

## **Инструкция**

### **Кресло реклайнер с подъемом Fujimo Synergy Lift Wide Kingchair F3005 FLWK (цвет на заказ)**

Полезные ссылки:

[Кресло реклайнер с подъемом Fujimo Synergy Lift Wide Kingchair F3005 FLWK \(цвет на заказ\) - смотреть на сайте](#)

[Кресло реклайнер с подъемом Fujimo Synergy Lift Wide Kingchair F3005 FLWK \(цвет на заказ\) - читать отзывы](#)



---

КРЕСЛО - РЕКЛАЙНЕР С ПОДЪЕМОМ



Руководство пользователя

**SYNERGY**  
**LIFT WIDE KINGCHAIR**

**F3005 FLWK**

версия 1.2022  
(ПОСТАВКА КРЕСЛА В РАЗБОРЕ)



---

## Кресло-реклайнер с подъемом F3005 FLWK

Благодарим Вас за покупку кресла реклайнера FUJIMO Synergy. Прежде чем использовать кресло, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство по правильному применению и эксплуатации.

Сохраните это руководство для будущего обращения к нему в случае возникновения вопросов.

**SYNERGY**  
**LIFT WIDE KINGCHAR**

Руководство\_пользователя

Меры безопасности	2 - 4
Составные части	5
Порядок сборки	6 - 8
Управление наклоном кресла	9
Порядок эксплуатации	10
Устранение проблем	11
Хранение и обслуживание	12
Ограничение гарантии	13 - 14
Спецификация	15
Для заметок	16 - 17

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

---

**При использовании массажного кресла необходимо соблюдать следующие меры безопасности, приведенные ниже:**

**ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ** перед началом использования.


**Внимание!** Для снижения риска получения ожогов, возгорания, поражения электрическим током или травм:

1. Всегда вставляйте вилку в розетку до упора, чтобы уменьшить риск короткого замыкания.
2. Всегда выключайте кресло и вынимайте вилку из розетки после его использования или перед чисткой.
3. НЕ используйте кресло, если на него попала вода. Сразу отключите его от сети.
4. НЕ используйте кресло после купания или душа.
5. НЕ оставляйте включенное кресло без присмотра. Отключите его от сети, если оно не используется.
6. НЕ оставляйте кресло без присмотра, когда оно используется людьми с ограниченными способностями или детьми.
7. Используйте кресло только по прямому назначению, как описано в руководстве. Не используйте дополнительные опции, не рекомендованные производителем.
8. НЕ используйте булавки или крепежные детали с креслом.
9. НЕ роняйте кресло, не помещайте внутрь чужие предметы.
10. НЕ используйте кресло в помещениях с высокой концентрацией аэрозоля или с низким содержанием кислорода.
11. НЕ перемещайте кресло, держась за сетевой шнур.
12. Кресло запрещено использовать детьми без присмотра.
13. НЕ допускайте зажима проводов или попадания их в движущие части, что может привести к поломке.
14. Не пользуйтесь креслом, если у него поврежден шнур или вилка питания, если оно неисправно, после падения или попадания на него воды. Срочно обратитесь в сервисный центр.
15. Не используйте кресло, если шум от его работы превышает обычный.
16. Избегайте контакта кресла с острыми краями или острыми предметами, которые могут порезать или проколоть его внешний чехол.
17. Чтобы избежать поломки, не оборачивайте сетевой шнур вокруг кресла.
18. Во избежание поломки кресла, выполняйте раскладывание и складывание спинки кресла строго по инструкции.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** Ваше кресло реклайнер включает движущиеся части. Необходимо проявлять должную осторожность и внимание при его использовании. Соблюдение следующих мер необходимо чтобы обеспечить безопасность себя и других.

Не позволяйте детям или младенцам играть рядом с креслом или на нем. Не оставляйте детей/младенцев без присмотра в той же комнате, где установлено кресло реклайнер.

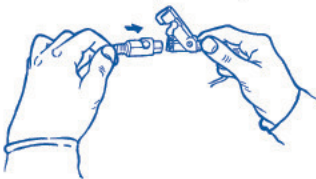

Для предотвращения случайного или несанкционированного использования, кресло реклайнер оснащено функцией быстрого отключения. Разъем находится на выходе адаптера питания сзади кресла. Всегда отсоединяйте разъем адаптера питания и храните его в безопасном месте, недоступном для детей, чтобы предотвратить неконтролируемое использование кресла.



Поскольку внутренний механизм кресла содержит движущиеся части, никогда не пытайтесь ремонтировать его или регулировать самостоятельно. По любым вопросам обслуживания обращайтесь в сервис FUJIMO. Всегда следите, чтобы электропровода не были заблокированы, перекручены или защемлены каким-либо образом. При повреждении проводки обратитесь в сервисный центр FUJIMO.



Не садитесь на подлокотники или на подставку ног, когда кресло находится в «разложенном» положении. Не пытайтесь дотянуться до чего-либо вокруг кресла, так как чрезмерный наклон может привести к опрокидыванию кресла.



В частности, кресло с откинутой спинкой может опрокинуться вперед, если вы с потянетесь вперед в положении сидя. Кресло в поднятом положении будет более восприимчиво к опрокидыванию, из-за приподнятого центра тяжести. Всегда при вставании с кресла, следите чтобы вокруг него не было посторонних предметов.



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Не наклоняйтесь вперед, когда подставка ног находится в поднятом положении, иначе это может привести к опрокидыванию кресла вперед. Всегда следите за тем, чтобы под креслом не было детей, домашних животных и посторонних предметов, чтобы избежать возможных травм или поломок кресла.



Поскольку кресло имеет движущиеся части, обращайтесь с ним с осторожностью. Перемещайте кресло только когда оно находится в стандартном положении. Никогда не пытайтесь передвигать кресло, когда оно находится в разложенном или поднятом положении. Всегда используйте подлокотники для перемещения кресла — не используйте спинку или подставку ног.



При перемещении кресла всегда отключайте его от сети. Это позволит избежать случайное заземление электрических проводов. После использования всегда возвращайте кресло в стандартное положение.



Никогда не размещайте кресло рядом с огнем или источником тепла. Не курите в кресле и не оставляйте зажженную сигарету на его поверхности. Не устанавливайте кресло слишком близко к стене, так как это может серьезно повредить двигатель, если наклон кресла будет ограничен.

Никогда не оставляйте кресло в поднятом положении, всегда возвращайте его в стандартную позицию после окончания его использования.



Обратите внимание, что кресло нельзя использовать по другому назначению, в том числе в качестве кровати.

Используйте с креслом только прилагаемый адаптер питания. Не используйте адаптеры других производителей, так как это может привести к поломке. Не разбирайте адаптер питания и не пытайтесь его ремонтировать.

## СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ


### Составные части массажного кресла






## ПОРЯДОК СБОРКИ

### Комплектация массажного кресла

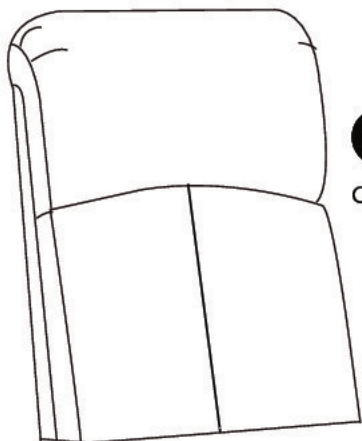**A**


Спинка кресла

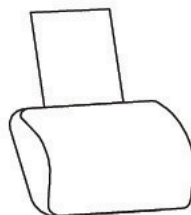**C**


Подголовник

**B**

Основание кресла

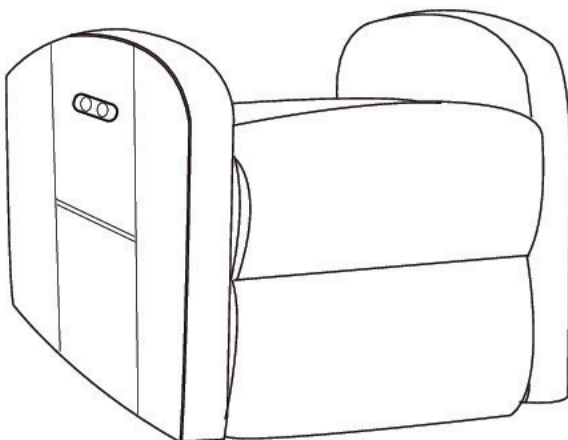**D**

Адаптер питания

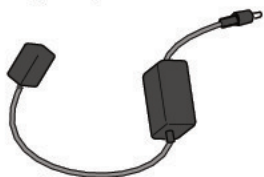

#### Комплект поставки составляет:

- A - Спинка кресла с пультом управления
- B - Основание кресла
- C - Подголовник
- D - Адаптер питания


## ПОРЯДОК СБОРКИ

### Схема сборки

#### **A** Освободите части кресла от упаковки




#### **B** Соедините разъем питания сзади кресла

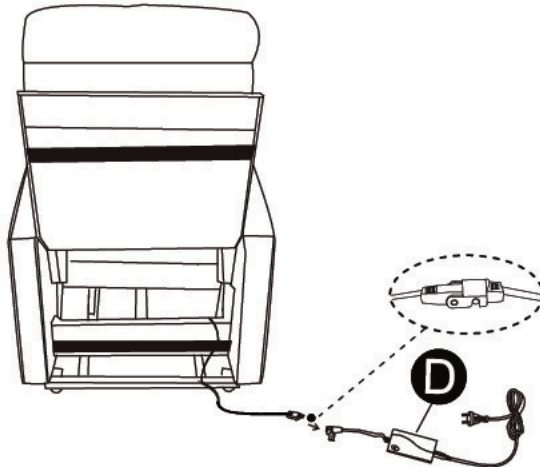

## ПОРЯДОК СБОРКИ

### Схема сборки

#### **C** Установите подголовник

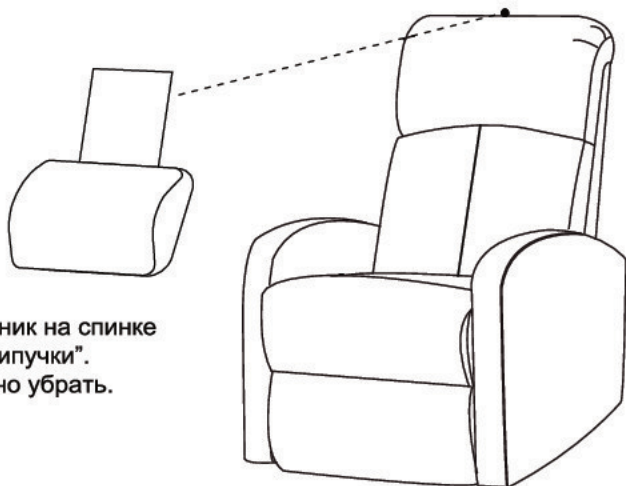

Установите подголовник на спинке кресла с помощью “липучки”. По желанию его можно убрать.

#### **D**



**ВАШЕ КРЕСЛО ГОТОВО  
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ!**

## УПРАВЛЕНИЕ НАКЛОНОМ КРЕСЛА

### Управление наклоном кресла реклайнером

Кресло реклайнер имеет кнопочную панель управления наклоном, расположенную на правом подлокотнике. Перед началом использования, рекомендуем вам потратить несколько минут, чтобы полностью ознакомиться с работой наклонного механизма кресла, выполнив один полный рабочий цикл раскладывания и складывания кресла с дальнейшим подъемом.

### Панель управления наклоном



Раскладывает спинку кресла назад и поднимает подставку для ног вверх в разложенное положение. При поднятом вверх кресле, опускает его вниз.

Возвращает спинку кресла в стандартную позицию, а подставку для ног в сидячее положение и после поднимает кресло вверх.



## ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Порядок раскладывания/складывания и подъема/опускания кресла

Пожалуйста, внимательно прочтите приведенное ниже руководство по правильному использованию кресла реклайнера. Это кресло имеет функцию раскладывания и складывания с дальнейшим подъемом при помощи встроенного электрического механизма наклона. Регулировка наклона проводится с помощью кнопочной панели на правом подлокотнике кресла. Раскладывание спинки назад проводится с одновременным подъемом подставки для ног вверх. Пожалуйста следите за детьми, когда они используют разложенное кресло.

#### Чтобы перевести кресло в положение лежа:

- Нажмите и удерживайте кнопку 1 РАСКЛАДЫВАНИЕ для приведение кресла в требуемое разложенное положение.



#### Чтобы вернуть кресло в прежнее положение / поднять вверх:

- Нажмите и удерживайте кнопку 2 СКЛАДЫВАНИЕ для возврата кресла в прежнее вертикальное положение. Продолжайте нажатие этой кнопки для подъема кресла вверх.





## УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Это кресло реклайнер имеет встроенный моторизированный механизм, питающийся от сети. Возможные проблемы в работе кресла реклайнера и способы их устранения представлены в таблице ниже:

Проблема	Причины	Решения
Кресло не работает	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Нет питания в сети</li><li>2. Отключен адаптер питания</li><li>3. Шнур питания поврежден</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Включите кресло после подачи питания</li><li>2. Подключите адаптер питания к креслу</li><li>3. Проверьте состояние шнура питания</li></ol>

При невозможности устранить неисправность, пожалуйста обратитесь к Поставщику или его дилеру.

## ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

---

### ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Для хранения массажного кресла, поместите его в коробку или накройте сверху чехлом. Разместите кресло в безопасное, сухое и прохладное место. Избегайте контакта с острыми краями или острыми предметами, которые могут порезать или проколоть поверхность кресла. Чтобы избежать поломки, не оборачивайте сетевой шнур вокруг кресла.

### ПРАВИЛА ОЧИСТКИ

- Избегайте попадания на кресло любой жидкости во время его очистки.
- Отключите массажное кресло от электросети и дайте ему остыть перед очисткой.
- Очищайте кресло только мягкой, слегка влажной губкой.
- Никогда не допускайте попадания воды или других жидкостей на электрические части массажного кресла.
- Не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, растворитель для очистки поверхности кресла.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать массажное кресло.

### ВНИМАНИЕ!

- Во избежание поломки кресла, выполняйте наклон спинки строго следуя инструкции.
- Во избежание травм спины, не опирайтесь с усилием на роликовый массажный механизм при изменении положения тела сидя в кресле.
- Не допускайте чрезмерного давления или усилия любой части тела на движущийся роликовый механизм.
- Во избежание получения травм и поломок, прилагайте к креслу только легкое усилие.

## ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

1. Гарантийные обязательства не подлежат передаче.
2. Данная гарантия действует только если массажное кресло приобретено у компании Релакса Стар или ее авторизованного дилера.
3. Доказательством покупки является кассовый чек (квитанция), которые обязательны к предъявлению для гарантийного ремонта.
4. Все подразумеваемые гарантии ограничиваются общей продолжительностью 1 год с даты покупки массажного кресла.
5. Повреждения и неисправности кресла, вызванные неправильным использованием, обслуживанием и несанкционированным ремонтом не распространяются на гарантию.
6. Гарантия не распространяется на аксессуары и приспособления, не относящиеся к креслу.
7. Гарантия не распространяется на массажные кресла, сдаваемые в аренду, используемые для коммерческих целей, используемые в организациях или в других нежилых помещениях. В этом случае срок гарантии устанавливается и согласуется отдельно.
8. Все услуги, охватываемые настоящей гарантией должны быть одобрены компанией Релакса Стар и выполняться только уполномоченным техническим персоналом.
9. Если запасные части для ремонтируемых массажных кресел временно недоступны на складе, компания Релакса Стар оставляет за собой право вносить изменения в сроки ремонта или замены запасных частей по своему усмотрению.  
Доказательство покупки (квитанция или кассовый чек) являются обязательными для всех гарантийных ремонтов.
10. Данное массажное кресло предназначено для использования на территории Российской Федерации и адаптировано под технические условия эксплуатации на данной территории. Использование этого кресла за пределами России может привести к потере гарантии.
11. Смягчение и деформация набивки подушек кресла и подголовника не является гарантийным случаем, так как эти элементы естественно смягчаются при использовании.

## ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

---

12. Выцветание и износ обивки кресла не является дефектом в соответствии с настоящей Гарантией, так как эти элементы естественно изнашиваются при эксплуатации.
13. Эта гарантия не распространяется на ущерб, причиненный в результате неправильного использования массажного кресла или злоупотребления массажем; несанкционированное использование любых аксессуаров; изменение конструкции кресла; неправильную установку кресла; несанкционированный ремонт; неправильное подключение массажного кресла к не рекомендуемому источнику питания; неисправность или повреждение электронной части кресла из-за неспособности обеспечить рекомендации производителя по техническому обслуживанию, транспортировку, кражу, пренебрежение рекомендациями, вандализм, или неправильные условия использования кресла или любые другие условия, которые находятся вне контроля производителя.
14. Ущерб, причиненный в результате транспортировки и разгрузки не является дефектом в соответствии с настоящей гарантией.
15. Производитель не несет ответственность в любом случае потери, повреждения или неудобства вызванного отказом массажного кресла.
16. Производитель не несет ответственность за случайный, косвенный или специальный ущерб.
17. Все подразумеваемые гарантии, включенные в данные ограничения, кроме случая коммерческого использования массажного кресла, ограничены общим сроком один год, начиная с даты покупки.
18. Исключительная ответственность компании производителя заключается в предоставлении бесплатного гарантийного ремонта и замены дефектной детали.



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	SYNERGY LIFT WIDE KINGCHAIR
Модель	F3005 FLWK
Тип	Кресло реклайнер
Входное напряжение адаптера питания	~ 220 - 240 В, Частота 50 - 60 Гц
Выходное напряжение адаптера питания	--- 29 В, 58 Вт
Габаритные размеры упаковки	(Д x Ш x В) 120 x 80 x 70 см
Габариты в стандартном положении	(Д x Ш x В) 100 x 70 x 110 см
Габариты в разложенном положении	(Д x Ш x В) 170 x 70 x 87 см
Габариты в поднятом вверх положении	(Д x Ш x В) 105 x 70 x 160 см
Ширина сиденья	(Д x Ш) 52 x 52 см
Минимальное расстояние от стены	40 см
Вес Брутто / Нетто	56 кг / 50 кг
Дата производства	_____ 202__ г.

**Производитель:** ООО РЕЛАКСА СТАР"  
ИНН 5027211583  
КПП 502701001



**Юридический адрес:** 140008 РФ, Московская область,  
Люберецкий р-он, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 59А

**Тел:** 8-800-333-00-51

**Сервисная служба:** 140002, г. Люберцы, ул. Колхозная, 19А, пом. II.

**Тел:** 8-495-789-91-77 **e-mail:** service@relaxa.ru





ДЛЯ ЗАМЕТОК \_\_\_\_\_

# SYNERGY

## LIFT WIDE KINGCHAIR

# SYNERGY

## LIFT WIDE KINGCHAIR



SYNERGY

LIFT WIDE KINGCHAIR

[fujimo.ru](http://fujimo.ru)