

Инструкция


Массажное кресло Askona Smart Jet Space Energy

Полезные ссылки:

[Массажное кресло Askona Smart Jet Space Energy - смотреть на сайте](#)

[Массажное кресло Askona Smart Jet Space Energy - читать отзывы](#)

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО Smart Jet Space Energy

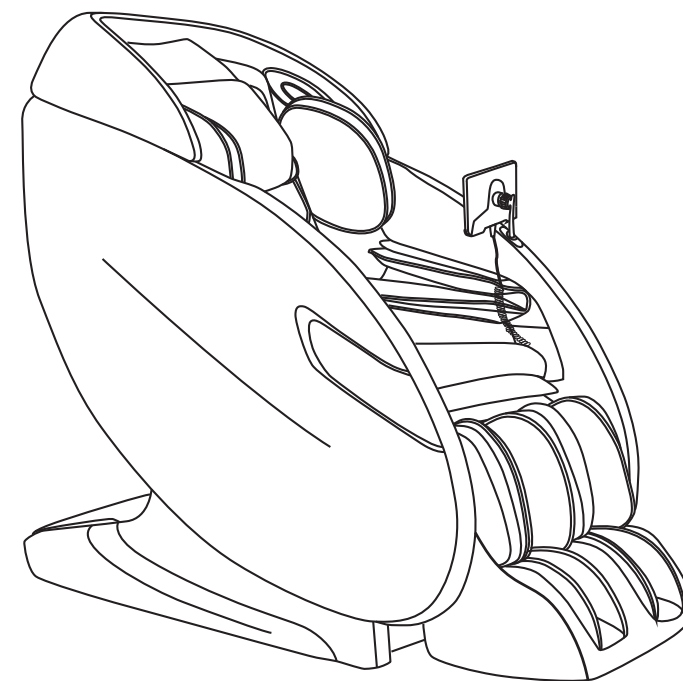

Руководство пользователя


Перед использованием массажного кресла внимательно прочтите данное руководство пользователя.
Храните эту брошюру для получения справки в будущем.

СОДЕРЖАНИЕ


Перед использованием прочтите все инструкции по технике безопасности и эксплуатации, приведенные в данном руководстве пользователя, и следуйте им. При эксплуатации электроприбора следует всегда соблюдать основные правила техники безопасности.

Правила техники безопасности	2-3
Спецификация продукта	4
Иллюстрация продукта	5-6
Установка и перемещение	7
Подготовка к использованию	8
Пульт управления	9-10
Эксплуатация устройства	11-15
Устранение неполадок	16
Обслуживание	17

ОБСЛУЖИВАНИЕ

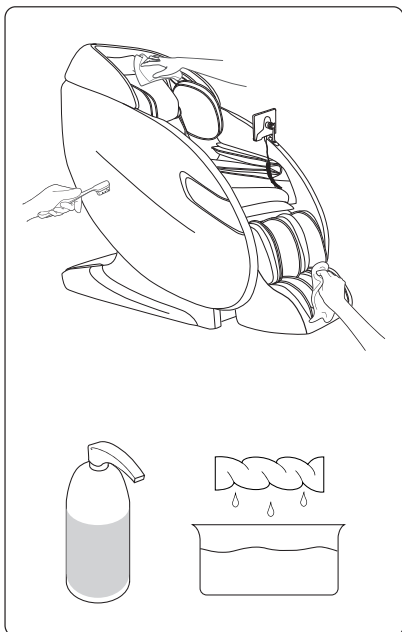

- Отсоедините от стенной розетки перед чисткой кресла.
- Сотрите воду или влажный налет сухой тканью.
- Используйте только нейтральные средства для удаления грязи и пятен.
- Выполните общую очистку с помощью влажной ткани.

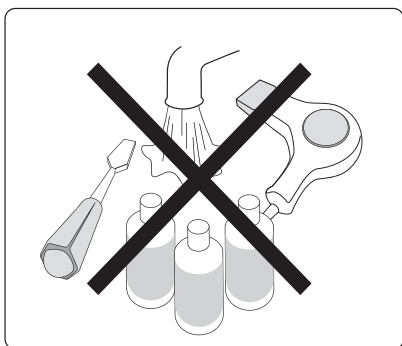

- Не чистите кресло водой.
- Не используйте фен для волос, чтобы высушить кресло.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение!

Вилку нужно полностью вставить в соответствующую розетку. Неправильное подключение проводника заземления оборудования может привести к риску поражения электрическим током.

Обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту по техническому обслуживанию, если сомневаетесь в правильности заземления продукта. Не меняйте вилку, поставляемую с продуктом, если розетка не соответствует. Убедитесь, что соответствующая розетка установлена квалифицированным электриком.

При использовании массажного кресла основные правила техники безопасности должны всегда соблюдаться, чтобы избежать риска поражения электрическим током, ожогов, возгорания или травм.

1. Убедитесь, что массажное кресло подключено к соответствующей розетке.
2. Убедитесь, что сетевая вилка надежно вставлена в соответствующую розетку для снижения риска короткого замыкания и возгорания.
3. Всегда отключайте массажное кресло от электрической розетки сразу после использования и перед очисткой.
4. Не используйте массажное кресло в местах с высокой влажностью.
5. Не используйте массажное кресло вне помещений и избегайте мест, подверженных действию прямых солнечных лучей.
6. При отключении электричества во время эксплуатации обязательно переведите выключатель питания в положение ВЫКЛ и выньте вилку из розетки для предотвращения повреждений при восстановлении питания.
7. Ни в коем случае не пользуйтесь массажным креслом с влажным или поврежденным кабелем питания.
8. Ни в коем случае не вставляйте/вынимайте кабель питания из розетки влажными руками.
9. При использовании устройства детьми, недееспособными лицами или лицами с ограниченными возможностями, а также рядом с ними, требуется пристальный и постоянный контроль.
10. Используйте это устройство только по прямому назначению, как описано в руководстве пользователя.
11. Не используйте сторонние детали.
12. Не стойте, не сидите и не прыгайте на ножной части массажного кресла во время использования массажного кресла для предотвращения риска возникновения травм.
13. Не пытайтесь встать на спинку или подлокотник для предотвращения риска возникновения травм.
14. Ни в коем случае не засыпайте во время массажа.
15. Всегда содержите массажное кресло в чистоте и ни в коем случае не вставляйте никакие предметы в отверстия на или вокруг массажного кресла.
16. Не тяните массажное кресло за шнур питания.
17. Перед тем, как опустить подножку/спинку, убедитесь, что под массажным креслом нет людей (в особенности детей), домашних животных или препятствий.

18. Перед использованием всегда проверяйте, не порвана и не повреждена ли поверхность массажного кресла, если на ткани на спинке появятся необычные потертости, не используйте массажное кресло. Пожалуйста, незамедлительно обратитесь в сервисный центр для получения справки.
19. Этот прибор разработан только для домашнего использования.
20. Лицам, страдающим от хронических болезней, необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием.
21. Следующим лицам необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием, чтобы снизить риск плохого самочувствия пользователя или получения травмы:
 - Лица со злокачественными образованиями.
 - Лица, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний.
 - Беременные женщины, в период менструации или послеродовой лихорадки.
 - Лица, нуждающиеся в полном покое.
 - Лица, проходящие медицинское лечение.
 - Лица, страдающие от проблем в спине, с искривлением или неправильным формированием позвоночника.
22. При появлении болей во время эксплуатации незамедлительно прекратите использование массажного кресла, при возникновении травм незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.
23. Ни в коем случае не массируйте опухшие или раздраженные части тела.
24. Этот продукт является непрофессиональным прибором, разработанным для проведения комфортного массажа. Не используйте этот продукт в качестве замены медицинского лечения.
25. Каждый сеанс массажа не должен превышать 30 минут. Массаж целевой области длится всего 15 минут. Слишком долгий массаж может привести к перегреву, что приведет к сокращению срока службы прибора.
26. Не используйте в местах, где применяются аэрозольные (распылительные) средства или где подается кислород.
27. Массажное кресло не предназначено для детей в возрасте до 12 лет включительно.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными или ментальными способностями, недостаточными знаниями и опытом, без надзора или инструктажа касательно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором. Если шнур питания поврежден, его следует заменить на специальный шнур или комплект, предоставляемый производителем или его сервисным представителем.

Прибор нагревается во время работы. Лица, чувствительные к нагреву, должны соблюдать дополнительную осторожность при использовании прибора.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В случае неправильной работы или отклонений, прекратите использование массажного кресла и отключите его от источника питания. Воспользуйтесь следующими способами решения проблемы. Если проблема остается, незамедлительно обратитесь к сервисному представителю.


Отклонения в работе	Возможное решение
Небольшой шум во время работы.	Это нормальное явление, так как механическая конструкция будет производить небольшой шум при движении.
Питание подается, но массажное кресло не работает.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте подачу питания к креслу, убедитесь, что оно полностью подключено. 2. Убедитесь, что выключатель питания сзади массажного кресла подсвечивается (в положении «I»).
Массажное кресло не реагирует на нажатия на панели управления.	<p>После длительного использования термостат, установленный на массажном кресле, активируется для предотвращения перегрева.</p> <p>Выключите все выключатели и клавишу питания, дайте массажному креслу остыть в течение 30 минут до повторного включения.</p>
И панель управления, и массажное кресло не работают.	<p>Предварительно установленная продолжительность массажа истекла, поэтому была активирована автоматическая блокировка.</p> <p>Переустановите время для повторного запуска работы.</p>

2. Синхронизация массажного кресла с музыкой по Bluetooth


- a. Синхронизация: включите устройство Bluetooth на мобильном телефоне или планшете. Выберите устройство Smart Jet Space Energy.
- b. Проигрывание музыки: после синхронизации используйте устройство управления мобильного телефона или планшета.

Примечание: отключите Bluetooth, если массажное кресло не используется.

3. После массажа

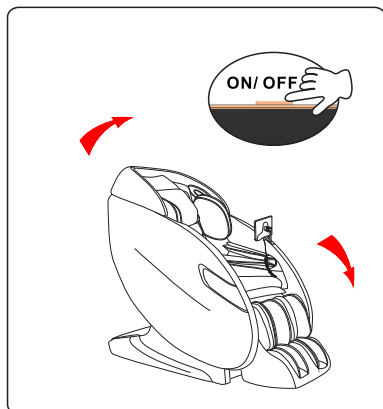

1. После массажа нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для возврата кресла в исходное положение.
***Убедитесь, что ничто не мешает креслу вернуться в исходное положение.**
2. Нажмите на выключатель питания на панели управления для отключения всех функций.

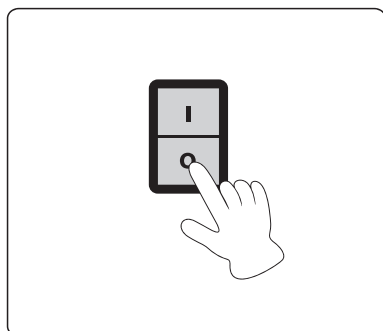


3. Нажмите клавишу ВЫКЛ для отключения источника питания.
4. Отключите от стенной розетки.
***Выключатель питания расположен сзади массажного кресла.**

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Описание	Спецификация
Наименование продукта	Массажное кресло Smart Jet Space Energy
Номер модели	A215L
Номинальное напряжение	220V-240V~
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальная потребляемая мощность	180 Вт
Вес нетто	116 кг
Вес товара с упаковкой	138 кг
Габариты, мм (ДхШхВ)	1420 x 870 x 1320

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРОДУКТА

Основной корпус (вид спереди)

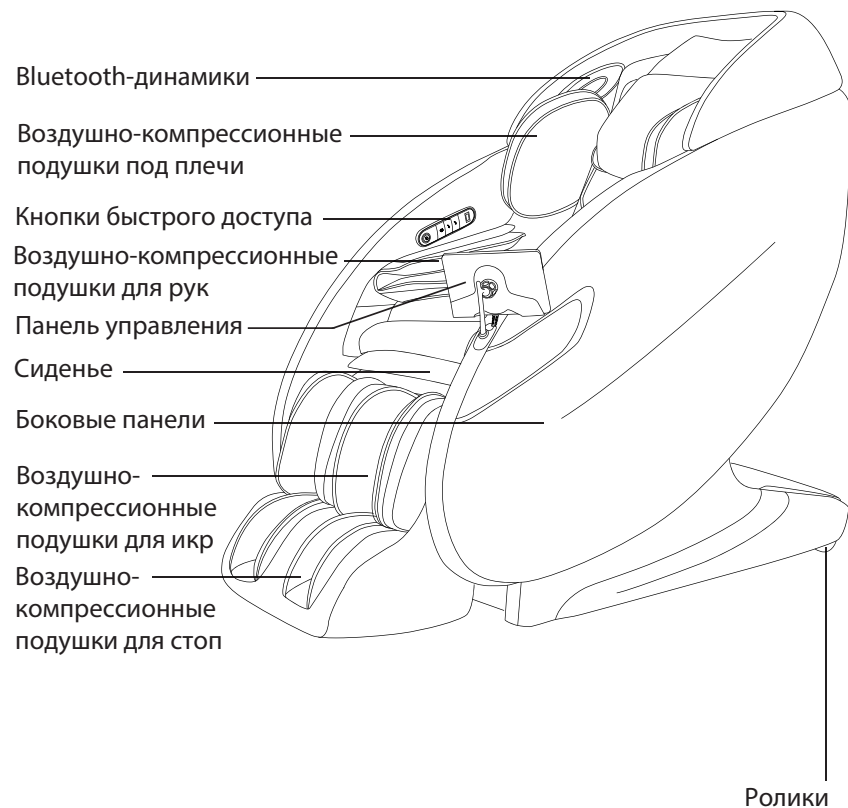


6. Положение сиденья



1. Спинка вверх/вниз.
2. Выдвижение ножной части.
3. Ножная часть вверх/вниз.
4. Положение невесомости: три уровня.

Примечание: Нажмите на соответствующую кнопку на экране для продолжения.


7. Настройки

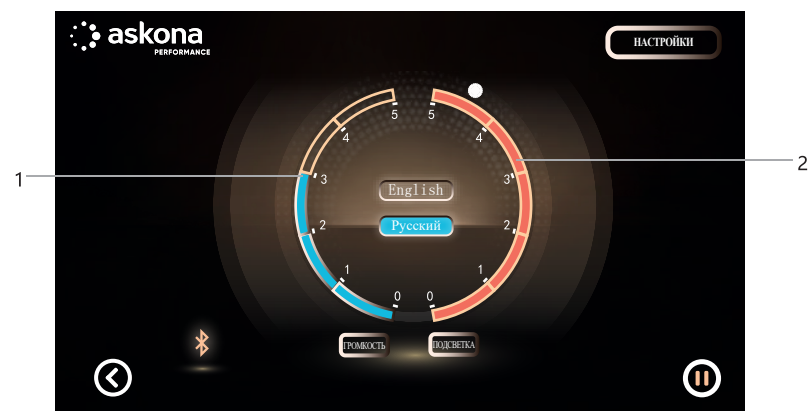

1. Настройка уровня громкости.
2. Настройка яркости подсветки.

Примечание: Нажмите на соответствующую кнопку на экране для продолжения.


4. Ручной режим

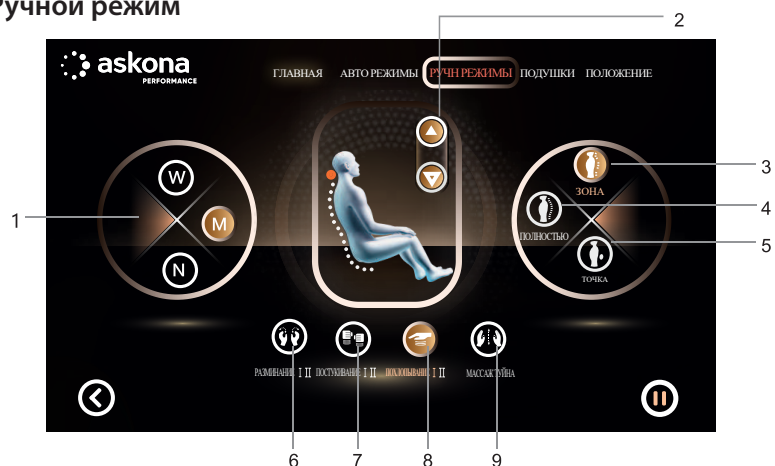

1. Ширина движения.
2. Движение вверх/вниз.
3. Частичный массаж.
4. Полный массаж.
5. Точечный массаж.
6. Разминание I/Разминание II.
7. Постукивание I/Похлопывание II.
8. Похлопывание I/Похлопывание II.
9. Массаж Туйна.

Примечание: Нажмите на соответствующую кнопку на экране для продолжения.


5. Воздушно-компрессионный массаж

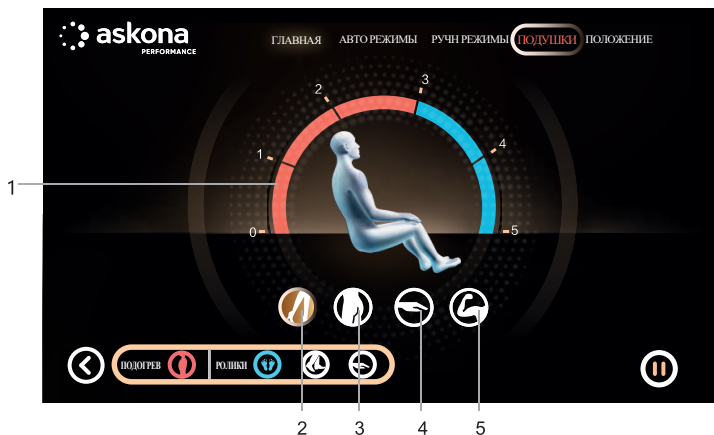

1. Интенсивность воздушно-компрессионного массажа.
2. Воздушно-компрессионные подушки для стоп.
3. Воздушно-компрессионные подушки для бедер.
4. Воздушно-компрессионные подушки для рук.
5. Воздушно-компрессионные подушки для плеч.

Примечание: Нажмите на соответствующую кнопку на экране для продолжения.

Основной корпус (вид сзади)

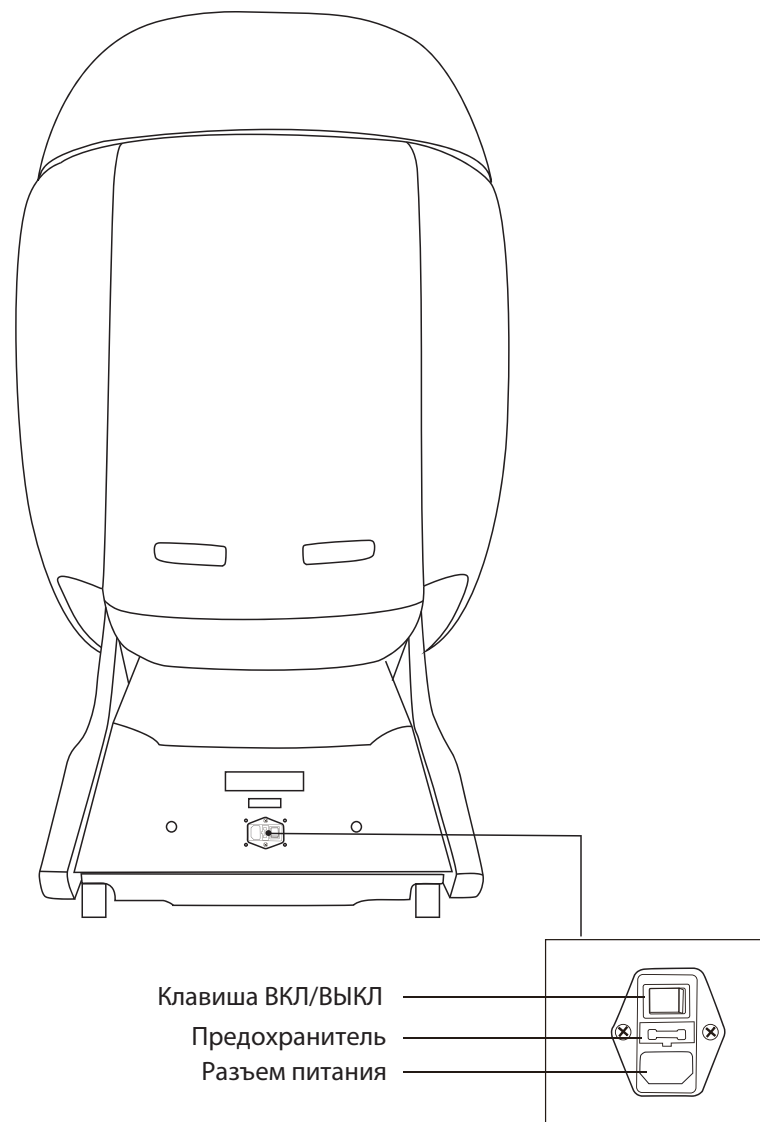


Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Предохранитель

Разъем питания


УСТАНОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

1. Установка массажного кресла

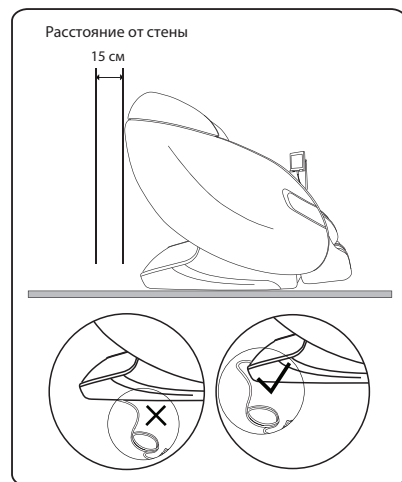

1. Установите массажное кресло в 15 см от стены и оставьте 50 см свободного пространства спереди.
2. Не кладите кабель под электрическую панель массажного кресла.
3. Поместите коврик или ковер под креслом, чтобы избежать появления царапин на полу и шума.
4. Для предотвращения перебоев сигнала поставьте массажное кресло вдали от предметов с радиочастотным излучением.

2. Перемещение массажного кресла

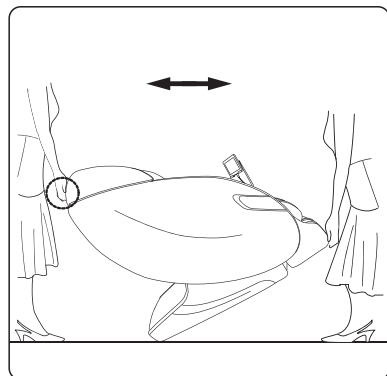

Для перемещения массажного кресла требуются 2 человека. Один должен держаться за подножку и поднимать, как показано на рисунке. Другой должен наклонить спинку кресла таким образом, чтобы ролики, расположенный сзади кресла, достали до пола. Переместите массажное кресло с помощью роликов. После перемещения в нужное место медленно и осторожно поставьте массажное кресло.

Примечание: Не перемещайте массажное кресло вместе с находящимся на нем пользователем. Предлагается переместить массажное кресло с ковриком или ковром под ним для предотвращения случайного повреждения пола.

3. Автоматический режим



10 уникальных автоматических режимов массажа во всех направлениях.




- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Интенсивность воздушно-компрессионных подушек. | 6. Ролики под стопы. |
| 2. Скорость движения. | 7. Ролики под икры. |
| 3. Уменьшение времени. | 8. Ролики под руки. |
| 5. Подогрев. | 9. Быстрые автоматические программы. |

Примечание: Нажмите на соответствующую кнопку на экране для продолжения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Иллюстрация интерфейса управления

Нажмите на выключатель питания на панели управления и выберите одну из следующих настроек:

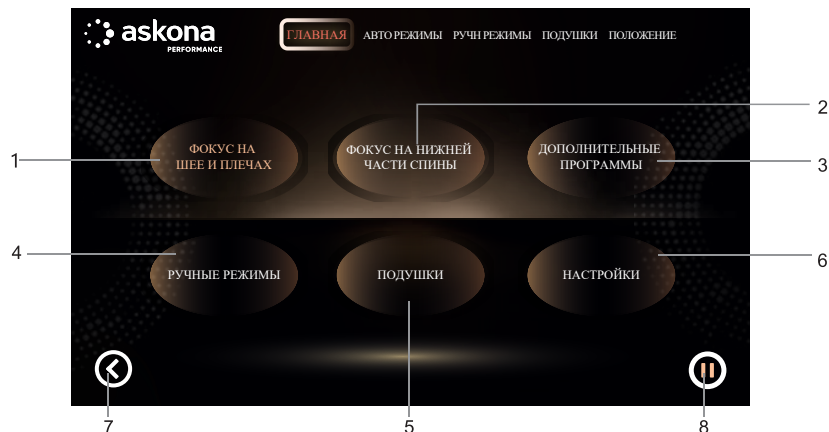


1. Автоматическая программа (Направлена на шею и плечи).
2. Автоматическая программа (Направлена на поясницу).
3. Больше количество программ.
4. Ручные режимы.

5. Воздушно-компрессионный массаж.
6. Настройка.
7. Переключение меню.
8. Пауза.


Примечание: Нажмите на соответствующую кнопку на экране для продолжения работы.

2. Сканирование

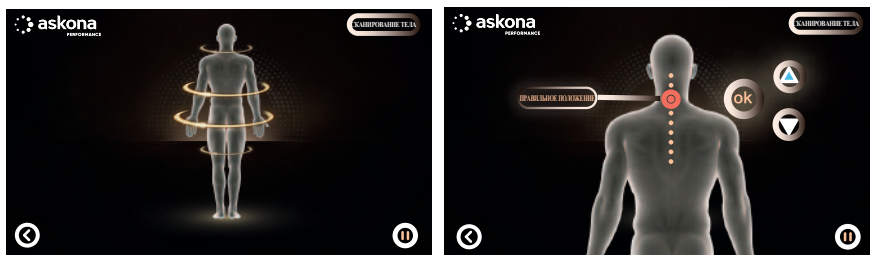


1. Последняя техника сканирования тела.
2. В течение 8 секунд после сканирования пользователь может немного поправить положение плеч или нажать ОК для подтверждения.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

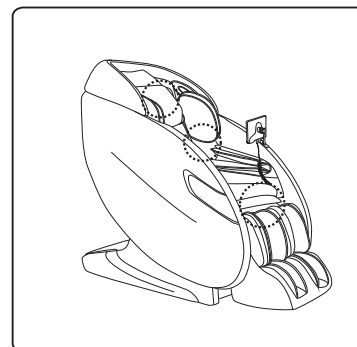


1. Убедитесь, что продукт находится в рабочем состоянии:

- Убедитесь, что подушка для спины и подушка для головы правильно прикреплены.
- Убедитесь, что вилка находится в хорошем состоянии.
- Убедитесь, что опорная рама кресла находится в вертикальном положении для предотвращения случайных повреждений кресла из-за давления, возникающего, когда пользователь сидит или лежит на нем.

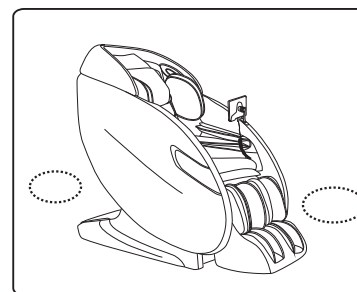


2. Убедитесь, что около кресла нет предметов, которые могут помешать его движению.

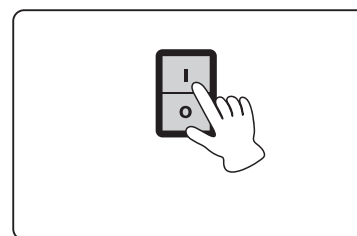

3. Подключите кресло:

- Подключите к настенной розетке.
- Нажмите на выключатель питания сзади кресла. Загорится индикатор питания панели управления.

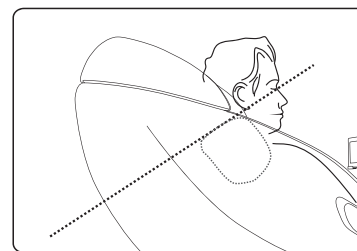


4. Настройте положение подголовника:

- Настройте положение подголовника под свой рост. Рекомендуется выровнять основание подголовника относительно мочки уха. Если подголовник настроен слишком высоко, это может повлиять на эффективность массажа шеи.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Расположен на правой внутренней панели массажного кресла.

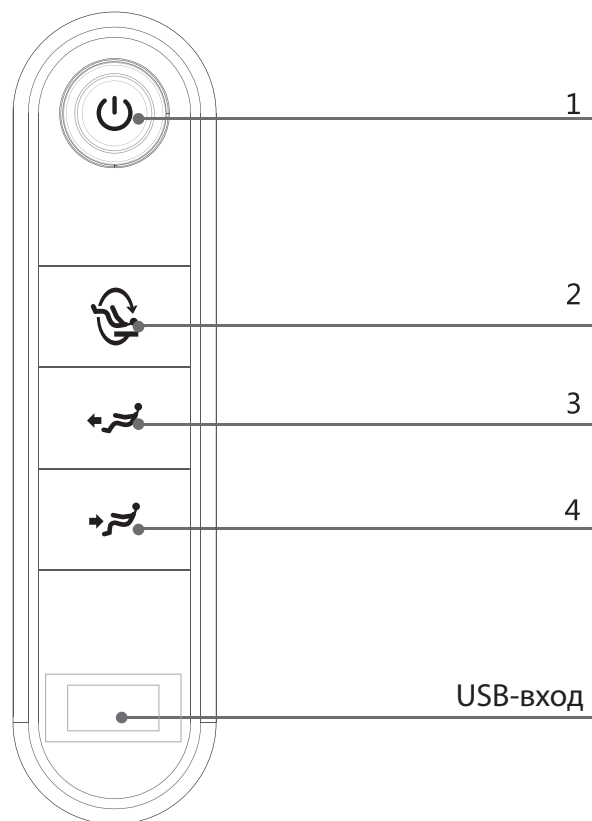

1. Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ массажного кресла.

Для включения массажного кресла нажмите и удерживайте в течение 2 секунд; для выключения массажного кресла снова нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.

2. Клавиша невесомости.

Нажмите, чтобы выбрать один из 3 уровней последовательно и вернуться к исходному положению.

3. Нажмите и удерживайте эту клавишу для поднятия подножки.

4. Нажмите и удерживайте эту клавишу для опускания подножки.

Панель управления

