

Инструкция

Массажное кресло Fujimo KO F377 Beige

Полезные ссылки:

[Массажное кресло Fujimo KO F377 Beige - смотреть на сайте](#)

[Массажное кресло Fujimo KO F377 Beige - читать отзывы](#)



Руководство Пользователя

Модель: F-377



Перед использованием, пожалуйста полностью прочитайте это руководство
Версия 01.2020

Содержание

Перед Использованием

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Меры безопасности | 1 - 2 |
| Составные части | 3 - 4 |
| Установка массажного кресла | 5 |
| Перед использованием | 6 - 8 |

Порядок Использования

| | |
|------------------------|--------|
| Пульт управления | 9 - 10 |
| После массажа | 11 |

Порядок обслуживания / Важная информация

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Порядок обслуживание | 12 |
| Устранение проблем в работе | 13 - 14 |
| Вопросы и ответы | 15 |
| Порядок заземления | 16 |
| Спецификация | 17 |

Благодарим Вас за покупку массажного кресла FUJIMO.
Перед его использованием, пожалуйста полностью прочитайте содержание
этого руководства и при необходимости обращайтесь к нему в будущем.

Меры безопасности

При использовании массажного кресла, необходимо строго соблюдать основные меры безопасности, изложенные ниже. Это снизит риск поражения электрическим током и вероятность травмирования.

- Осторожно вставляйте вилку кресла в электрическую розетку, чтобы избежать риска поражения электрическим током и возгорания.
- Для бесперебойной работы массажного кресла, настоятельно рекомендуется использовать сетевой фильтр.
- НЕ используйте массажное кресло в местах с высокой влажностью воздуха, например, в сауне, парной, возле бассейна, в ванных комнатах или возле отопительных приборов и т. д.
- НЕ используйте кресло вне помещений и под прямым солнечным светом.
- Всегда отключайте вилку из розетки после завершения использования массажного кресла, чтобы предотвратить его повреждение при перебоях с подачей электроэнергии, что может привести к серьезным повреждениям.
- Никогда не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками.
- Не оставляйте кресло без присмотра, если оно используется инвалидами или детьми, или установлено в месте их нахождения.
- Используйте массажное кресло только по прямому назначению, как описано в данной инструкции.
- Только один человек должен использовать кресло одновременно.
- Не используйте дополнительные аксессуары, кроме рекомендованных производителем.
- Не вставайте, не садитесь и не прыгайте на подставке для ног, спинке и подлокотниках кресла. Это может привести к неисправности или травме.
- Не засыпайте во время массажа.
- Всегда держите массажное кресло в чистоте. Не вставляйте посторонние предметы в отверстия и ниши массажного кресла.
- Не отключайте и не передвигайте кресло, потянув за кабель питания.
- Перед включением массажного кресла проверьте, что возле него нет никого (в частности, детей), животных или препятствий, которые могут попасть под движущиеся части кресла.
- Если во время работы отключилось питание, переведите выключатель питания в положение "О" и затем выньте вилку из розетки. Это предотвратит возможные проблемы, во время повторного включения питания.
- Если вы обнаружили какие-либо разрывы обшивки кресла, обратитесь в сервисный центр и немедленно прекратите использование кресла.
- Это кресло предназначено для домашнего использования и не может использоваться в других целях.

Меры безопасности

- Проконсультируйтесь с вашим врачом, если у вас есть сомнения по возможности использования массажного кресла.
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажного кресла, если вы беременны, проходите медицинское лечение, используете электронное медицинское устройство, такое как кардиостимулятор, или страдаете от какого-либо из следующих недугов: Злокачественная опухоль, болезнь сердца, боли в пояснице, искривление или травмы позвоночника, остеопороз или другие острые заболевания.
- Если вы испытываете боль при использовании массажного кресла, немедленно прекратите массаж и проконсультируйтесь с врачом.
- Никогда НЕ используйте массаж на опухших или воспаленных частях тела.
- НЕ используйте массажное кресло более 30 минут за 1 сеанс.
- НЕ используйте кресло, в помещениях где используются аэрозоли (спреи) распылители или где имеется большая концентрация кислорода.
- Это кресло не является профессиональным оборудованием и создано для обеспечения комфортного отдыха и оздоровительного массажа. Тем не менее кресло не может заменить полноценного медицинского лечения.
- Никогда не используйте кресло с пережатыми воздушными трубками. Не допускайте их засорения или проникновения внутрь волос и других посторонних предметов.
- Предварительно проверяйте нагреваемые зоны на ощупь, чтобы снизить риск получения травмы. Возникновение сбоев в работе нагревательного элемента и чрезмерный нагрев могут привести к серьезным ожогам.
- Перегрев может быть признаком неправильного использования кресла. Если это произошло, немедленно выключите кресло и обесточьте его.
- Перед использованием кресла снимите с себя все украшения, часы и другие предметы. Также проверьте карманы, вынув из них ключи и ручки.
- Держите детей подальше от подвижной опоры для ног и спинки кресла.
- НЕ САДИТЕСЬ В КРЕСЛО В МОКРОЙ ОДЕЖДЕ И НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ НА НЕГО ЖИДКОСТИ.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕСЛА С ОСТРЫМИ И КОЛЮЩИМИСЯ ПРЕДМЕТАМИ.
- НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ ЧЕХОЛ КРЕСЛА.




Внимание

Максимальная нагрузка кресла ограничена весом пользователя 100 кг. При использовании кресла механизм может автоматически остановиться в целях безопасности, если на него оказывается слишком большая нагрузка. В этом случае выключите питание и перезапустите массажное кресло через 10 секунд.

Составные части


Вид сбоку

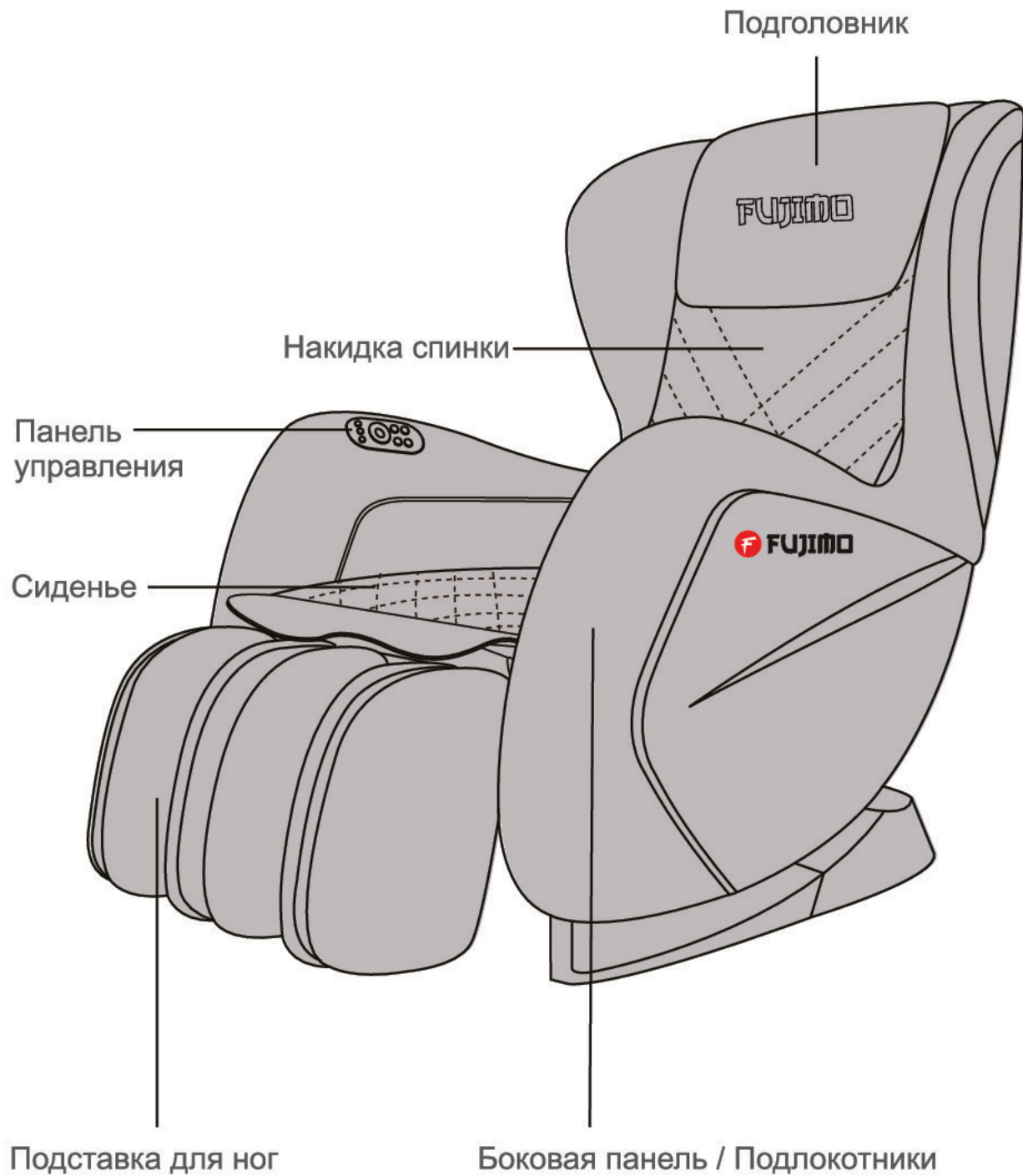

Составные части

Вид спереди


Расположение воздушных подушек

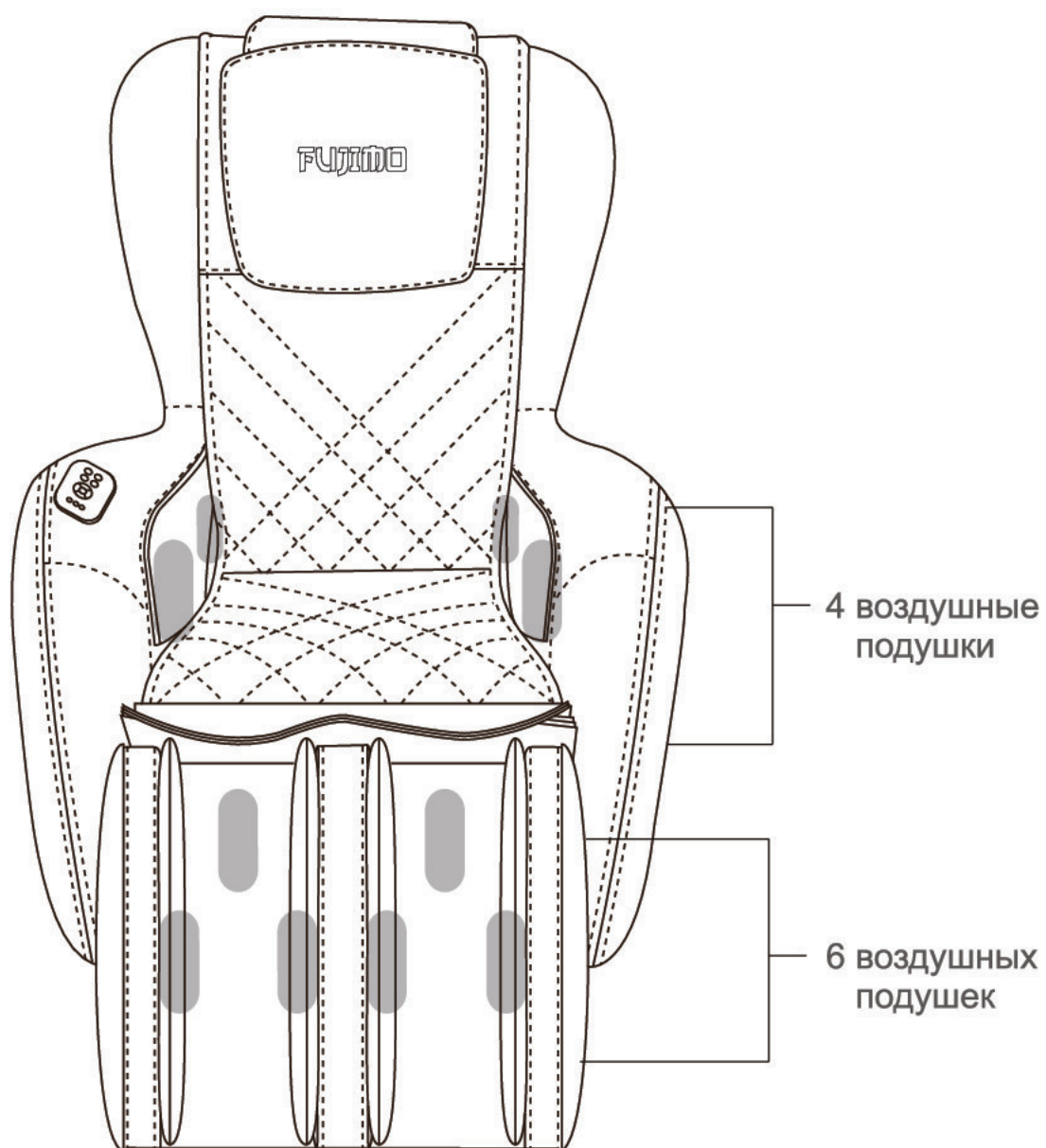

Установка массажного кресла

1 Перед установкой (место установки)

Убедитесь, что имеется достаточно места для раскладывания кресла.

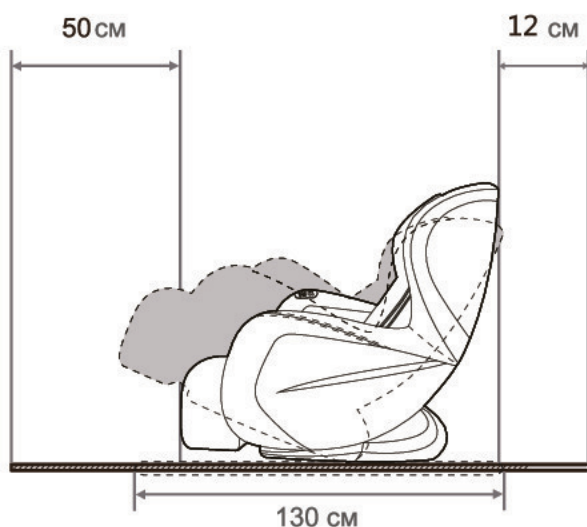

- Не подвергайте кресло воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур, например, не устанавливайте его возле источника тепла, поскольку это может привести к обесцвечиванию или затвердеванию обивки.
- Установите кресло на коврик, чтобы предотвратить повреждение пола.
- При размещении коврика под креслом, его размер должен быть не менее 130 см x 80 см, для покрытия области основания кресла и подставки для ног, как показано на рисунке слева.
- Устанавливайте кресло рядом с электрической розеткой.

2 Порядок перемещения кресла

Наклоните кресло, чтобы легко перемещать по помещению.



※ ВНИМАНИЕ!

Перед перемещением кресла, установите его в исходное положение. Это обезопасит от возможных травм при перемещении.

- Не рекомендуется перемещать кресло, если в нем кто-то сидит.
- Во избежание повреждения пола, разместите кресло на коврике или половике.

- Кресло тяжелое и поэтому будьте осторожны во время его перемещения

| | |
|------------|-------------|
| Вес кресла | Около 53 кг |
|------------|-------------|

Устанавливайте кресло только на горизонтальной поверхности

- Опускайте кресло вниз медленно и осторожно, чтобы не повредить подставку для ног.
- Не отпускайте подставку ног, пока кресло не установлено горизонтально. Иначе подножка вернется в исходное положение.
- Расположите кресло на коврике, чтобы уберечь пол от повреждений.



ВНИМАНИЕ!

- Не тяните и не толкайте кресло после его установки.
- При перемещении кресла не держитесь за боковые панели. Иначе может возникнуть неисправность или травмы.
- Не перемещайте кресло на роликах по голому полу. Иначе на полу могут остаться царапины и следы.


- Не перемещайте кресло, когда в нем сидят люди. В противном случае это может привести к несчастным случаям или травмам.

- Не держитесь за подставку для ног при перемещении кресла. В противном случае из-за скольжения могут возникнуть травмы.

Перед использованием

1 Проверьте пространство вокруг кресла


Убедитесь, что рядом с креслом нет детей, домашних животных или других предметов.

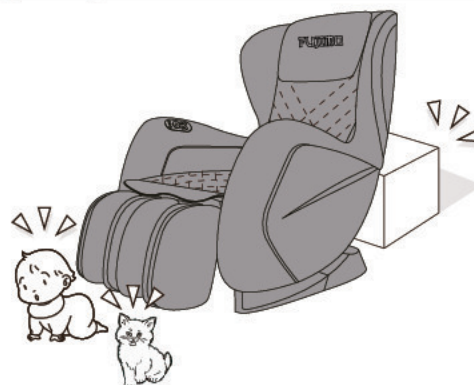

2 Разместите накидку и закрепите ее на молнии.

Разместите накидку на спинке и закрепите ее к основанию кресла с помощью молнии.

Накидка спинки

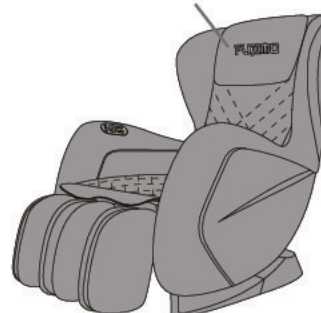


3 Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в массажном кресле.

При проверке подставки для ног надавите руками на подставку спереди и убедитесь, что в швах нет посторонних предметов.



ВНИМАНИЕ!

- Перед массажем, убедитесь в отсутствии посторонних предметов между любыми его частями.
- Не размещайте руки, ладони или голову между спинкой кресла и внешней накидкой спинки.
- Не сажайте домашних животных на кресло (например, на накидку спинки кресла, спинку и подлокотники).

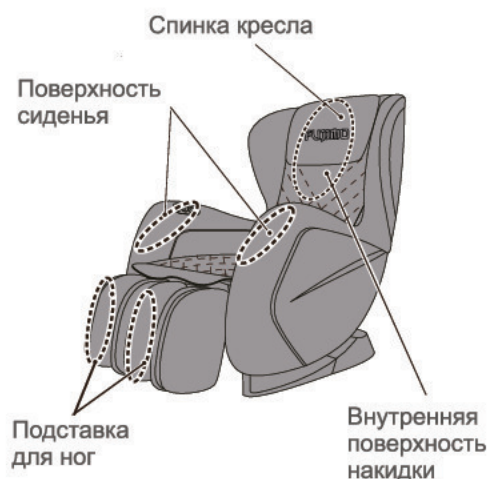


Перед использованием (продолжение)

4 Проверьте состояние шнура питания и вилку


ВНИМАНИЕ!

- **Регулярно удаляйте грязь, например пыль, с вилки питания.**
В противном случае может возникнуть возгорание, вызванное плохой изоляцией из-за влажности.
(Протирайте вилку кабеля питания сухой тканью.)
- **Не повреждайте сетевой шнур и вилку питания. Не растягивайте, не сгибайте, не скручивайте и не удлиняйте сетевой шнур или вилку питания; не размещайте сетевой шнур или вилку рядом с обогревателем, не подсоединяйте и не привязывайте тяжелые предметы к сетевому шнуру или вилке питания.**
Поврежденный шнур или вилка питания могут привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.
Пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом, где вы купили кресло, или обратитесь в авторизованный сервисный центр, чтобы узнать о способах ремонта или замены сетевого шнура или сетевой вилки.

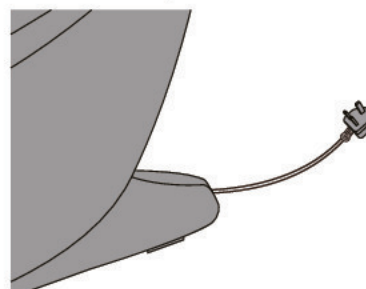

Не допускайте запутывания сетевого шнура.


Плотно вставьте вилку в разъем питания.

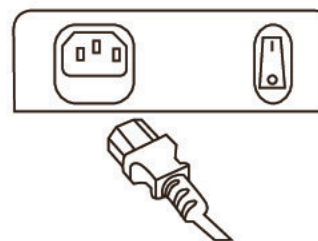

5 Подключение кресла к питанию


1 Вставьте вилку кабеля питания в розетку.

2 Переведите выключатель питания в положение "I".

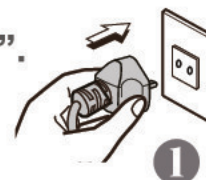

ВНИМАНИЕ!


- **Вставьте вилку сетевого шнура в розетку до упора.**
Иначе возможно поражение электрическим током или возгорание из-за перегрева.
- **Строго соблюдайте правила использования розеток и электрооборудования.**
- **Используйте источник питания 220-240 В, 50-60 Гц. (Не используйте кресло за границей и не подключайте его к трансформатору без разрешения.)**
В противном случае может произойти поражение электрическим током, поломка кресла или возгорание из-за переядания.
- **Не вставляйте и не вынимайте вилку кабеля питания мокрыми руками.**
В противном случае возможно поражение электрическим током.

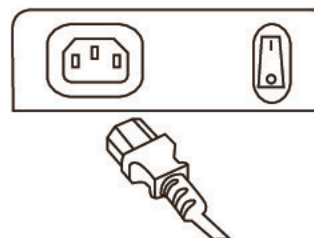

Перед использованием (продолжение)

6 Проверьте положение массажных роликов


Убедитесь, что ролики не выпирают вперед и убраны назад.

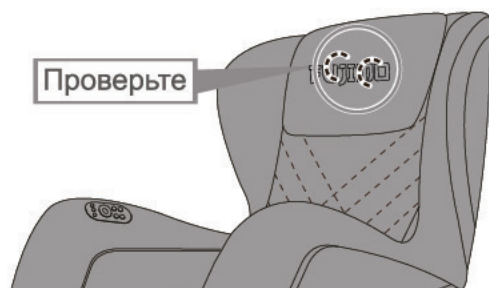

Если ролики не втянуты, нажмите кнопку «ВКЛ», чтобы вернуть их в стандартное положение внутри.

7 Проверьте состояние внешних чехлов

Убедитесь, что внешняя и внутренняя поверхность чехлов не повреждена и не потрескалась.

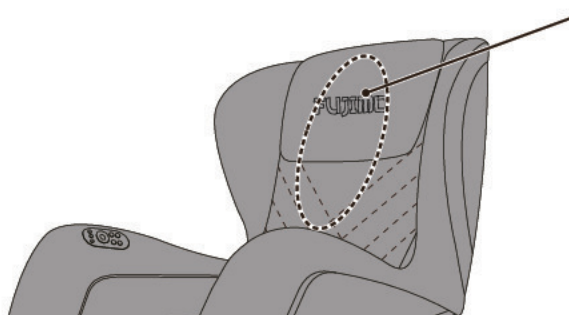

Проверяемая область: поверхность чехлов движущихся частей массажных роликов в области спинки и сиденья.




ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием проверьте, не повреждена ли поверхность чехлов в области, указанной на рисунке. (В случае если поверхность имеет даже легкое повреждение, немедленно прекратите использование кресла, вытащите вилку из розетки и свяжитесь с сервисным центром.)

Если кресло используется с поврежденной поверхностью ткани, вы можете получить травму или удар электрическим током.

Пульт управления

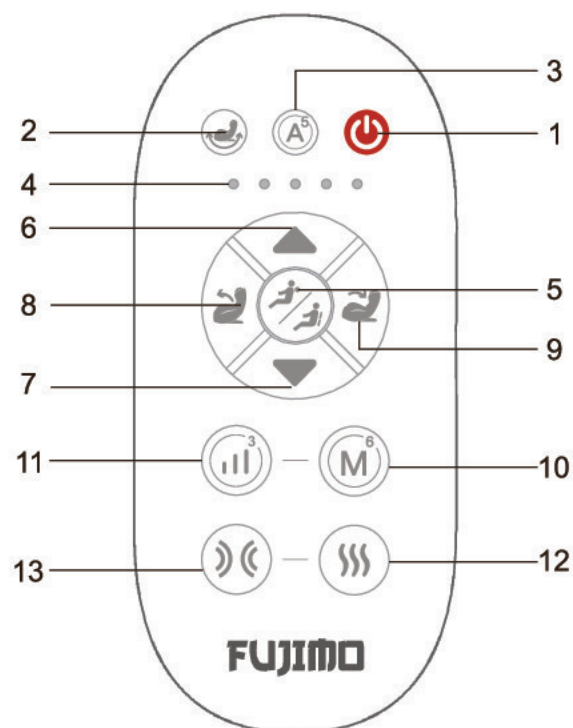

Подключите кресло к питанию и переведите переключатель в положение «I», после чего кресло перейдет в режим ожидания. В режиме ожидания доступны только 3 функции: ВКЛ / ВЫКЛ, Наклон вперед, Наклон назад.

1. ВКЛ / ВЫКЛ

Кнопка включения / выключения кресла

В режиме ожидания нажмите эту кнопку чтобы перевести кресло в активное состояние. Затем нажмите любую кнопку функции массажа, чтобы начать сеанс. Это также запустит таймер. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ еще раз, чтобы остановить все функции массажа. При этом массажные ролики вернуться в исходное положение.

2. Zero-G (Невесомость) & Swing (Раскачивание)

Нажмите кнопку один раз, чтобы активировать функцию Zero-G. Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить эту функцию. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы активировать функцию раскачивания. Нажмите кнопку еще раз на 2 секунды, чтобы остановить функцию.

3. Автоматические программы

Нажмите эту кнопку, чтобы активировать одну из 5 автоматических программ. Каждое нажатие меняет программы в следующей последовательности: Массаж глубоких тканей > Массаж шеи > Офис ПРО > Тонус > Релакс. Если активирована любая автоматическая программа, кресло автоматически выполнит сканирование высоты плеч. После окончания сканирования, пользователь может вручную отрегулировать положение плеч по желанию.

5. Точка / Зона воздействия

Выбор точечного или частичного массажа спины

Эта кнопка позволяет выбрать точечный массаж части спины. Нажмите кнопку один раз, для активации точечного массажа в нужном месте. Для перехода в режим массажа выбранной зоны нажмите кнопку еще раз. При этом массаж зафиксирован в выбранной точке и ролики начнут воздействие в диапазоне около 8 см. Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить эту функцию.

7. Вверх / Вниз

Если ручная или автоматическая установка уровня плеч не соответствует индивидуальным требованиям, вы можете вручную настроить это положение, нажимая кнопку Вверх / Вниз в течение 10 секунд. Как только будет найдено подходящее положение, отпустите кнопку чтобы зафиксировать свой выбор.

Примечание: при массаже выбранной точки или зоны вы также можете использовать эти кнопки для регулировки положения массажа.

8-9. Регулировка Наклона Кресла

Эти кнопки управляют наклоном кресла назад / вперед. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отрегулировать наклон спинки и подставки для ног в желаемом положении, а затем отпустите кнопку чтобы остановить это.

10. Ручной Режим

Нажмите кнопку для активации функции ручного массажа с ритмичным разминанием всей спины со средней интенсивностью. Последовательно нажимайте кнопку для изменения вида ручного массажа в следующей последовательности: Разминающий > Постукивающий > Шведский > Шиаци > Похлопывающий и разминающий > Раскатывающий > Стоп.

11. Интенсивность / Ширина

В ручном режиме Разминающий / Постукивающий / Похлопывающий / Шиаци / Раскатывающий, нажмите кнопку для изменения силы массажа в пределах: Уровень 1 > Уровень 2 > Уровень 3.

В ручном режиме нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды, чтобы изменить ширину роликов в последовательности: Широкая > Средняя > Узкая.

12. Прогрев поясницы

Нажмите кнопку один раз, для активации прогрева поясницы, нажмите еще раз, чтобы ее выключить. При работе функции прогрева индикатор мигает.

13. Воздушно-компрессионный Массаж

Воздушная компрессия имеет 2 режима воздействия.

Каждое нажатие кнопки последовательно меняет режим:


Воздушная компрессия 1 > Воздушная компрессия 2 > Стоп.

Воздушная компрессия 1 направлена на область ягодиц и икр.


Воздушная компрессия 2 направлена только на область икр.

После массажа

Отключите кресло от питания.

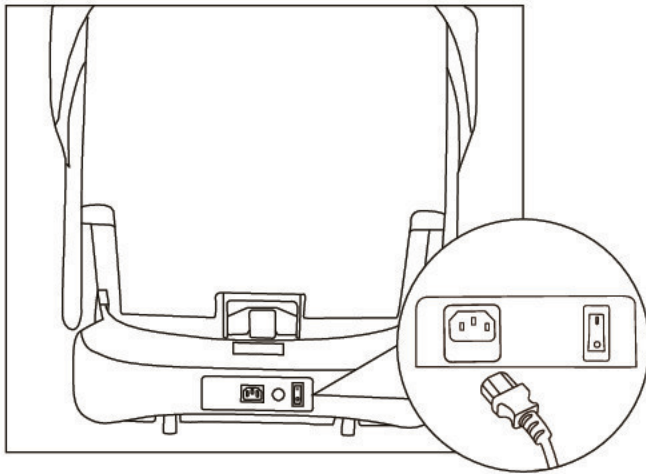

- ① Переведите кнопку переключателя в положение «О»
- ② Вытащите вилку из розетки и отсоедините сетевой провод от кресла.

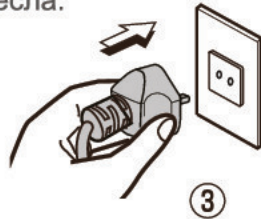

Функция таймера

Массаж заканчивается автоматически после окончания времени таймера.

- Подставка для ног остается в конечном положении.
- Массажные ролики перемещаются внутрь спинки кресла (втягиваются).
- Спинка остается в том же положении автоматически.
- Для возврата спинки и подставки ног в исходное положение, нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ.



ВНИМАНИЕ!

- После каждого использования кресла переведите кнопку переключателя в положение «О» и вытащите вилку из розетки;
В противном случае это может привести к несчастному случаю и травме из-за игры детей с креслом.

Порядок обслуживания

Уход за обивкой из искусственной кожи

Протрите искусственную кожу мягкой сухой тканью.

- Не используйте концентрированные чистящие средства и средства с содержанием спирта.
- При использовании специальной ткани для чистки, следуйте инструкции на упаковке
- Если искусственная кожа очень грязная, воспользуйтесь методом чистки, ниже:
 1. Положите мягкую ткань в воду с нейтральным моющим средством и затем выжмите ее.
 2. Протрите тканью загрязненную поверхность.
 3. Положите ткань в воду без содержания моющих средств и затем выжмите ее.
 4. Протрите загрязненную поверхность снова, чтобы удалить остатки моющего средства.
 5. Вытрите поверхность сухой мягкой тканью.
- Если трудно удалить загрязнение, намочите кусок пены меламина, купленный в магазине, в нейтральном моющем средстве и используйте его, чтобы очистить поверхность.
- Не сушите поверхность с помощью фена.
- Поверхность может быть окрашена тканевыми красками; Поэтому будьте осторожны при очистке кресла джинсовой или цветной тканью.
- Синтетическая кожа может обесцвечиваться, поэтому место контакта обивки с окрашенными волосами должно быть защищено полотенцем.



Уход за пластиковыми частями

1 Намочите мягкий кусок ткани в чистой холодной воде или в теплой воде с нейтральным чистящим средством. Выжмите ткань и протрите ей пластиковую поверхность кресла.

- Не используйте для чистки сильные моющие средства или средства с содержанием спирта.

2 Протрите поверхность куском ткани, смоченной в чистой воде и отжатой.

- Перед тем как протереть кнопочную панель управления, тщательно выжмите ткань.

3 Дайте пластиковым деталям естественно просохнуть на воздухе.



Устранение проблем в работе

При возникновении неисправности проверьте описанные ниже рекомендации по устранению проблем в работе. Если после этого неисправность не исчезнет, обратитесь к продавцу, у которого вы купили кресло или в сервисный центр.

| Неисправность | Причина и метод устранения |
|---|--|
| Массажные ролики остановились во время использования (кресло издает звуковой сигнал, все значки и кнопки панели управления мигают, а затем гаснут). | <u>В целях безопасности массажные ролики могут остановиться из-за слишком большого внешнего давления во время использования кресла.</u> Если все значки и кнопки на панели управления начинают мигать, это свидетельствует о превышении нагрузки на ролики. В этом случае выключите питание и включите его через 10 секунд. Если массажные ролики снова остановятся, отрегулируйте положение сидя и не опирайтесь на спинку полностью. (Этим правилам следует особенно придерживаться спортсменам, и тем, кто тяжелее 100 кг.) |
| Кресло или подставка для ног не наклоняются (Кресло издает звуковой сигнал, все значки и кнопки панели управления погасли и массаж остановился) | <u>В целях безопасности кресло остановилось при наличии препятствия или большой нагрузки.</u> Если все значки и кнопки мигают, а спинка или подставка для ног остановились, выключите питание и включите его примерно через 10 секунд, а затем включите кресло снова. |
| Массажные ролики не достигают плеч или шеи | Если голова не соприкасается с подголовником или спина не полностью прижата к спинке кресла, положение плеч может быть отсканировано ниже фактического. Сядьте глубоко в кресло, разместите голову на подголовнике и проведите повторное сканирование уровня плеч, после чего снова начните сеанс массажа. |
| Левый и правый ролики имеют разную высоту выступа (интенсивность). | Это не является неисправностью, а вполне нормальное явление, потому что кресло оснащено массажным механизмом, позволяющим осуществлять попеременное воздействие массажных роликов. |
| Кресло вообще не включается. ● Массаж верхней части тела (от шеи до талии) ● Массаж области икр | <ul style="list-style-type: none">● Линия электропитания отключена. Включите ее.● Электропереключатель не включен. Включите его.● После нажатия кнопки ВКЛ на пульте дистанционного управления не выбрана программа. Выберите соответствующую программу. |
| Кресло повреждено. | Во избежание несчастных случаев прекратите использование массажным креслом и обратитесь в авторизованный сервисный центр FUJIMO. |
| Сетевой кабель или вилка сильно нагреваются. | |

Если вышеуказанные методы устранения неисправности не привели к устранению неисправности, свяжитесь с сервисным центром FUJIMO для консультации и проведения ремонта.

Устранение проблем в работе (продолжение)


Звуки и ощущения, которые вам кажутся ненормальными при использовании кресла

При использовании кресла Вы можете услышать звук или ощутить воздействие, которое покажется вам ненормальным. Однако это вполне нормально и является результатом особенности конструкции массажного кресла.

- Звук перемещения массажных роликов при растягивающем массаже
- Звук трения роликов о ткань, при разминающем массаже
- Звук перемещения массажных роликов при разминающем и постукивающем массаже
- Звук трения ткани при перемещении массажных роликов
- Звук передвижения роликов вверх-вниз
- Звук передвижения шестерни по зубчатой рейке
- Звук работы двигателей
- Звук перемещения массажных роликов при постукивании
- Звук трения между подлокотниками и спинкой при наклоне кресла
- Звук трения между массажными роликами и тканью
- Звук воздушного насоса во время массажа воздушными подушками
- Звук выпуска воздуха во время компрессионного массажа
- Звук работы электромагнитного клапана в нижней части кресла во время компрессионного массажа
- Звук перемещения опоры для ног
- Звук накачивания воздушных подушек
- Звук передвижения подставки для ног
- Звук трения между накидкой спинки и основанием спинки кресла

Если при работе кресла слышится громкий звук, это может быть причиной выхода массажного кресла из строя.

- В этом случае обратитесь в сервисный центр для проверки массажного кресла и его ремонта.

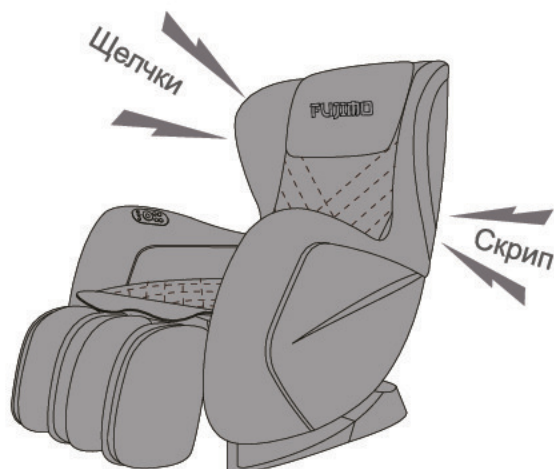

ВНИМАНИЕ!

- Не устанавливайте, не разбирайте и не ремонтируйте кресло без разрешения. В противном случае возможно возгорание, аномальная работа кресла или травмы.



ВНИМАНИЕ!

- В случае каких-либо отклонений от нормы или неисправности немедленно остановите кресло и выньте вилку кабеля питания, чтобы избежать задымления, возгорания или поражения электрическим током.
<Примеры отклонений в работе и неисправностей>
 - Кресло не работает после того, как переключатель питания переведен в положение ВКЛ;
 - После перемещения сетевого провода прекращается питание кресла;
 - При использовании кресла ощущается запах гари или слышен необычный звук;
 - Кресло деформировано или ненормально нагревается→ при любых из этих отклонениях и неисправностях немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта массажного кресла.

Вопросы и ответы

Q Могут ли люди, проходящие лечение и имеющие проблемы со здоровьем, использовать массажное кресло?

A Эти люди должны посоветоваться с лечащим врачом перед использованием кресла.

Массаж - это так называемая «стимуляция прикосновением»: мышцы сжимаются, чтобы снять напряжение и способствовать гемокинезу. Некоторые заболевания могут обостриться из-за массажа. Таким образом, перед использованием кресла проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Q Есть ли какие-то особенности, которые требуется особо учитывать при перемещении кресла?


A Во время переезда обратите внимание на следующее.

Выключите переключатель питания и вытащите вилку из розетки.

- Если оригинальная упаковка отсутствует, убедитесь, что сетевой шнур не намотан на кресло. Отсоедините шнур из разъема кресла, смотайте его и положите на сиденье. При перемещении кресла следите за тем, чтобы сетевой шнур не падал и не задевал землю.
- Если оригинальная упаковочная коробка отсутствует, сохраните надлежащим образом другие вспомогательные упаковочные материалы и оберните ими кресло, чтобы избежать царапин и вибрации во время работы.

Q Где находится серийный номер массажного кресла?

A Он находится на задней части основного корпуса.

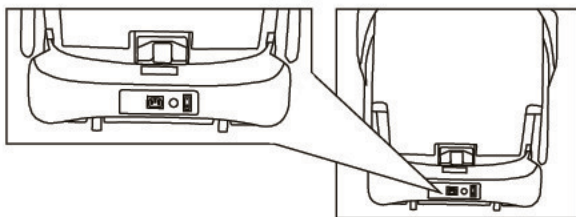

Q Имеет ли значение, если массажные ролики создают различную интенсивность массажа?

A Эта ситуация может проявляться во время массажа из-за особенностей конструкции :

Для имитации наиболее естественного ощущения массажного воздействия кресло имеет особую конструкцию, позволяющую попеременно массировать спину левым и правым массажным роликом. Во время массажа массажные ролики могут иметь немного разное положение на спине. Вот почему у вас возникает такое чувство. Это не является ошибкой.

Q Как насчет ежемесячного энергопотребления массажного кресла?

A Предположим, вы делаете массаж в течение 30 минут два раза (по 15 минут каждый раз) каждый день. Каждый месяц будет потребляться около 0,6 киловатт-часов.

Q Меня волнуют звуки, которые издает кресло при использовании.

A Это вызвано особенностями конструкции внутренних механизмов кресла. Не стоит беспокоиться.

Порядок заземления

Массажное кресло должно быть обязательно заземлено.


Если оно неисправно или сломано, заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического тока, что уменьшает риск поражения электрическим током.

Это массажное кресло оснащено сетевым шнуром со штекером и вилкой, имеющими заземляющий провод.

Внимание! Вилка должна быть вставлена в розетку, которая имеет заземляющий контакт и установлена в соответствии со всеми правилами заземления.

Неправильное подключение массажного кресла к сети питания может привести к поражению электрическим током. Проверьте правильность подключения с квалифицированным электриком или специалистом сервисного центра. Если вилка массажного кресла не подходит к сетевой розетке, установите подходящую розетку с помощью квалифицированного электрика.

Это массажное кресло предназначено для использования от сети напряжением 220В и имеет вилку заземления, как показано ниже. Убедитесь, что кресло подключено к розетке, имеющей такую же конфигурацию, как вилка. Для данного массажного кресла не требуется адаптер вилки.

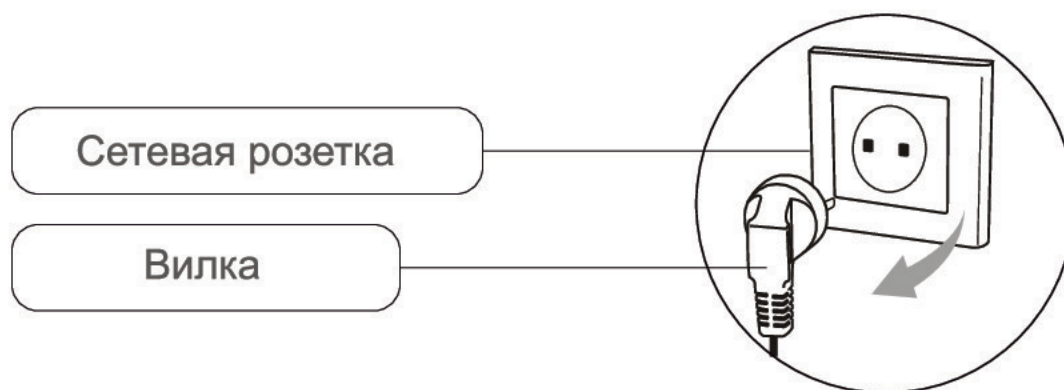

Спецификация

| Описание | Спецификация |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Модель | FUJIMO F-377 |
| Напряжение питания | 220 ~ 240 В, 50 / 60 Гц |
| Мощность | 60 Вт |
| Таймер | 15 минут |
| Габариты (Д x Ш x В) | Стандартное: около 116 x 71 x 100 см |
| | Разложенное: около 139 x 71 x 78 см |
| Габариты упаковки (Д x Ш x В) | 143 x 74,5 x 83,5 см |
| Вес Нетто | Около 53 кг |
| Вес Брутто | Около 63 кг |
| Условия использования | Температура воздуха : 0°C ~ 35°C |
| | Относительная влажность : 20 - 80 RH |
| Условия хранения | Температура воздуха : 0°C ~ 35°C |
| | Относительная влажность : 20 - 80 RH |
| Максимальная нагрузка | 100 кг |



www.fujimo.ru