

Инструкция

Массажное кресло-качалка EGO Wave EG2001F Шоколад (Арпатеки)

Полезные ссылки:

[Массажное кресло-качалка EGO Wave EG2001F Шоколад \(Арпатеки\) - смотреть на сайте](#)

[Массажное кресло-качалка EGO Wave EG2001F Шоколад \(Арпатеки\) - читать отзывы](#)

ЭГО

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО-КАЧАЛКА



Руководство пользователя

WAVE

Версия 2.2021 FUJIMO (сборка)



Массажное кресло-качалка EG2001

Благодарим Вас за покупку массажного кресла EGO WAVE. Прежде чем использовать кресло, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство по правильному применению и эксплуатации.

Сохраните это руководство для будущего обращения к нему в случае возникновения вопросов.

WAVE

Руководство пользователя

Меры безопасности	2 - 3
Составные части	4
Инструкция по сборке	5 - 8
Пульт управления	9
Порядок эксплуатации	10 - 11
Хранение и обслуживание	12
Устранение проблем	12
Спецификация	13



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрического оборудования, особенно в присутствии детей, необходимо соблюдать меры безопасности, приведенные ниже:

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ перед началом использования массажного кресла.

Внимание! Чтобы уменьшить риск получения ожогов, возгорания, поражения электрическим током или травмы:

1. Всегда вставляйте вилку в розетку до упора, чтобы уменьшить риск короткого замыкания.
2. Всегда выключайте кресло и вынимайте вилку из розетки после его использования или перед чисткой.
3. НЕ используйте кресло, на которое попала вода. Немедленно отключите его от сети.
4. НЕ используйте кресло после купания или душа.
5. НЕ следует оставлять без присмотра включенное кресло. Отключите кресло от сети, когда оно не используется.
6. НЕ оставляйте кресло без присмотра, когда оно используется людьми с ограниченными способностями передвигаться или разговаривать.
7. Используйте кресло только по его прямому назначению, как описано в этом руководстве пользователя. Не используйте дополнительные аксессуары, не рекомендованные производителем.
8. НИКОГДА не используйте булавки или другие крепежные детали с этим креслом.
9. НИКОГДА не используйте кресло во время сна и не засыпайте во время выполнения массажа.
10. НЕ роняйте кресло и не вставляйте в него посторонние предметы.
11. НЕ используйте кресло в помещениях с высокой концентрацией аэрозоля (спрея) и с низким содержанием кислорода.
12. НЕ передвигайте кресло, держась за сетевой шнур и не используйте сетевой кабель в качестве ручки.
13. Это кресло не должно использоваться детьми.
14. Перед использованием кресла, проверьте состояние тканевого покрытия роликового механизма спинки и убедитесь что оно не разорвано. Проверьте также состояние тканевого покрытия в других областях и убедитесь что на нем нет разрывов. Если Вы обнаружите какое-либо повреждение, немедленно прекратите использование массажного кресла, отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр для ремонта.
15. Никогда не пользуйтесь креслом, если у него поврежден шнур или вилка питания, если оно не работает правильно, если оно упало и повредилось или на него попала вода. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для ремонта.
16. Массажное кресло предназначено для личного, некоммерческого использования. Любое другое использование приведет к аннулированию гарантии.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, внимательно прочитайте все указания по безопасности перед началом эксплуатации кресла:

1. Если у Вас есть проблемы со здоровьем или Вы относитесь к категориям людей, указанных ниже, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием кресла:
 - а) при наличии злокачественной опухоли
 - б) при болезнях сердца
 - в) при беременности
 - г) при заболеваниях, требующих покоя
 - д) при болезнях спины или если у Вас в прошлом были травмы спины в результате несчастного случая
2. Люди с кардиостимуляторами и другими медицинскими имплантатами должны проконсультироваться с врачом перед применением кресла.
3. Не используйте кресло более 15 минут одновременно. Чрезмерный массаж может привести к неблагоприятному эффекту.
4. Непрерывное использование кресла может привести к его перегреву и сокращению срока службы. Если это произойдет, немедленно прекратите использование и дайте креслу остыть для возобновления массажа.
5. Никогда не используйте массаж непосредственно на опухших или воспаленных местах или при кожных раздражениях.
6. Это массажное кресло не является профессиональным прибором и обеспечивает только разминающий и сглаживающий массаж. Не используйте его в качестве замены медицинской помощи.
7. Это массажное кресло никогда не должно использоваться людьми, имеющими любое физиологическое заболевание, ограничивающее их возможности для работы с элементами управления.
8. Это массажное кресло никогда не должно использоваться людьми, имеющими любое физиологическое заболевание, ограничивающее их возможности ощущать массажное воздействие в любой части тела, на которую направлен массаж.
9. При обнаружении неисправности или других аномальных условий в работе кресла, немедленно выключите питание и отсоедините шнур из розетки.
10. Если на кресло была пролита вода или другая жидкость, отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр.
11. Не используйте кресло, если оно находится на мокром полу или какая либо часть Вашего тела находится в контакте с водопроводной трубой или другим аналогичным заземленным предметом.
12. Не используйте кресло, если шум от его работы превышает обычный звук выполнения массажа.
13. Во избежание травм спины, не опирайтесь с усилием на роликовый массажный механизм при регулировке положения тела. Не допускайте чрезмерного давления или усилия любой части тела на движущийся роликовый механизм.
14. Во избежание получения травм, прилагайте к креслу только легкое усилие.


СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Составные части массажного кресла

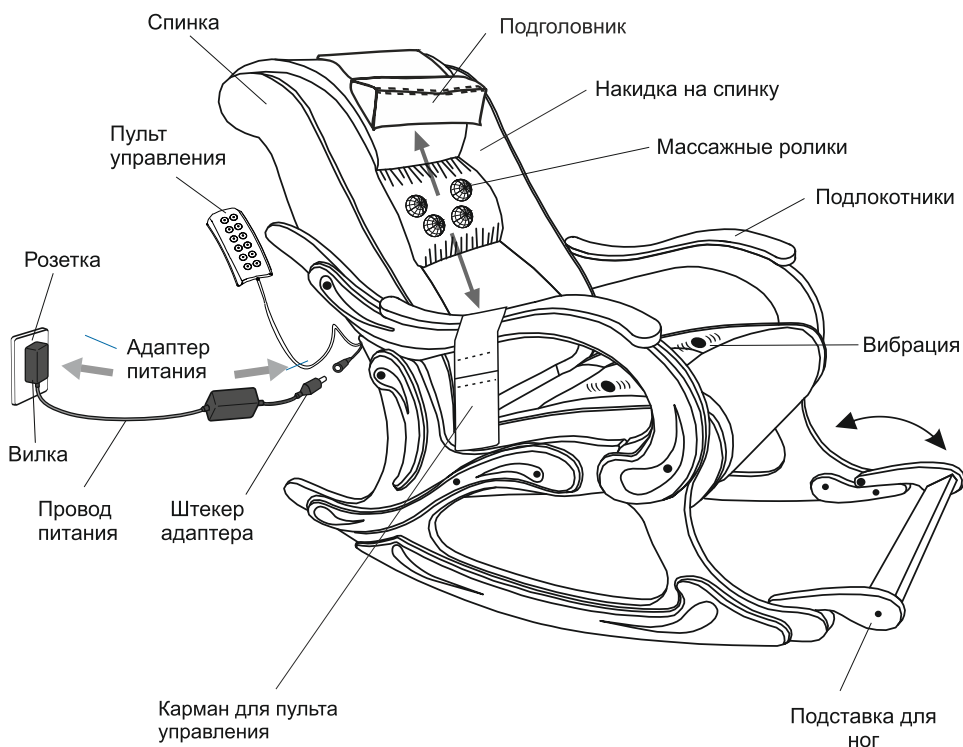

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


ВНИМАНИЕ Если кресло поставляется уже в собранном виде, его сборка не требуется. В этом случае переходите на стр. 9 Порядок эксплуатации. Обязательно следуйте пошаговой инструкции по сборке. Дефекты, возникшие в результате неквалифицированной сборки изделия, не будут являться гарантийным случаем.

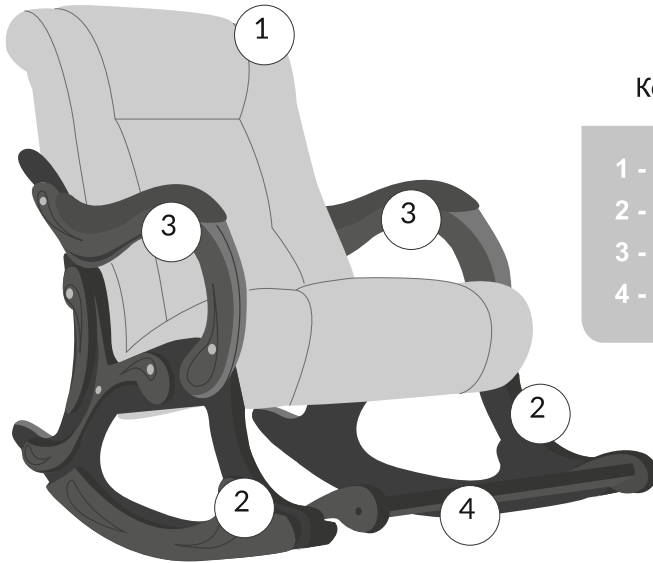


Комплектация поставки

- 1 - мягкая часть - 1 шт.
- 2 - боковая панель - 2 шт.
- 3 - подлокотники - 2 шт.
- 4 - опора для ног - 1 шт.

- 5. Винт РНЗ 6x50 - 12 шт.
- 6. Винт конфирмат 7x50 - 2 шт.
- 7. Заглушка винта 6x50 - 10 шт.
- 8. Заглушка винта 7x50 - 2 шт.
- 9. Ключ шестигранный - 1 шт.
- 10. Подголовник - 1 шт.
- 11. Карман пульта - 1 шт.

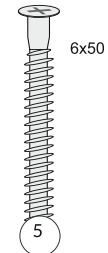


12 шт

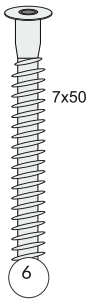


2 шт.




10 шт.

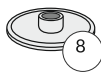


2 шт.

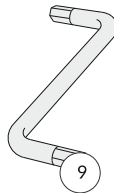

1 шт

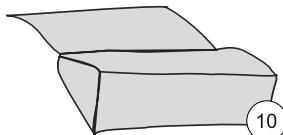

1 шт

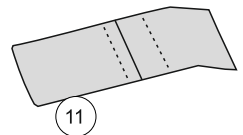

1 шт


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Закрепление правой боковины и правого подлокотника (Рис.2)

- совместите отверстия в правой боковине ②, с отверстиями в мягкой части ①;
- вкрутите 4 винта 6 x 50 через боковину в мягкую часть, используя крестовую отвертку типа PH3;
- совместите подножку ⑥ с пазом в опоре для ног ④ и вкрутите один конфирмат 7 x 50, в деталь ④ через опору ⑥;
- совместите отверстия в правом подлокотнике ④ с мягкой частью и вкрутите два винта 6 x 50;
- аккуратно переверните кресло на другой бок.


3 ШАГ Закрепление левой боковины и левого подлокотника (Рис.3)

- совместите отверстия в левой боковине ③, с отверстиями в мягкой части ①;
- вкрутите 4 винта 6 x 50 через боковину в мягкую часть, используя крестовую отвертку типа ;
- совместите подножку ⑤ с пазом в опоре для ног ⑥ и вкрутите один винт конфирмат 7x50, в деталь ⑤ через опору ⑥;
- совместите отверстия в левом подлокотнике ⑤ с мягкой частью и вкрутите 2 винта 6x50;
- поставьте кресло в вертикальное положение (на ноги);
- установите все заглушки к винтам;
- сборка завершена.

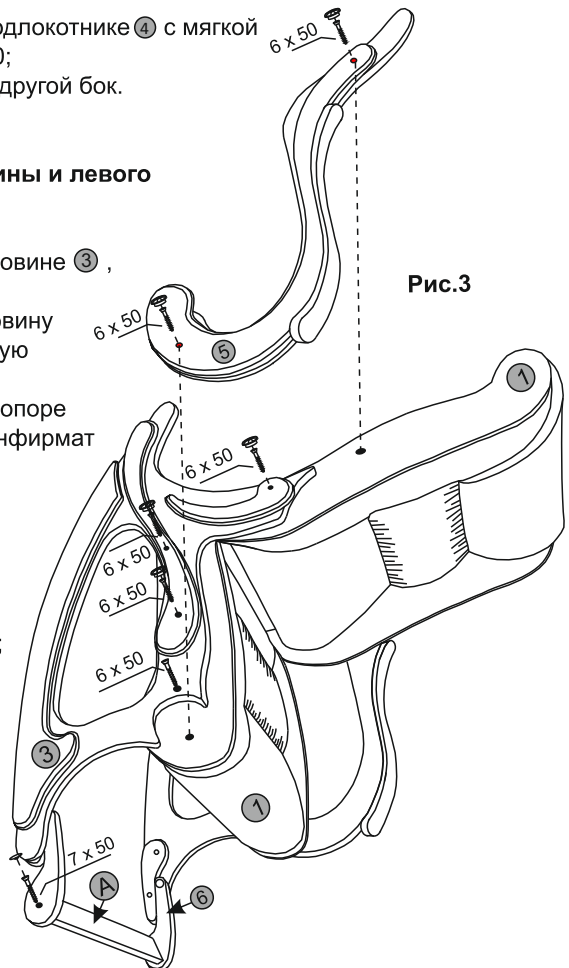

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопки управления

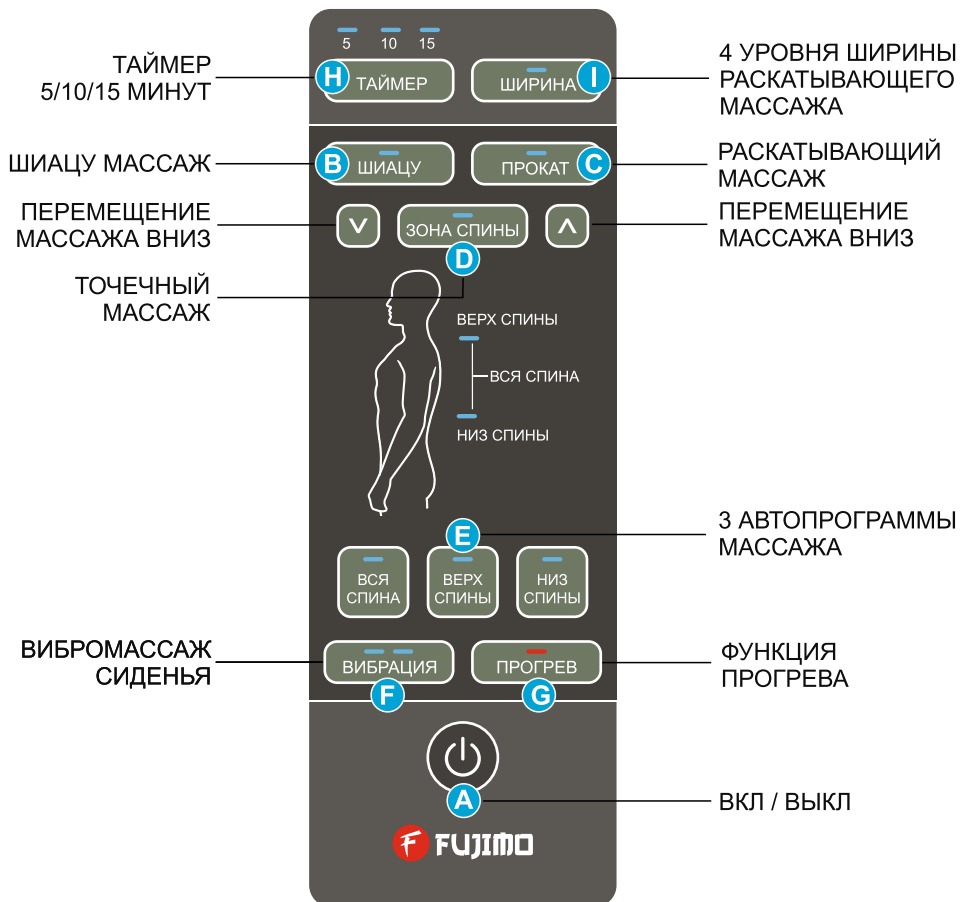

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для полноценного массажа откиньте переднюю накидку кресла назад. Это позволит получить полноценный контакт с массажными роликами. Управление режимами массажа осуществляется с помощью кнопок пульта, расположенного в правом боковом кармане.

A) ПИТАНИЕ (ВКЛ / ВЫКЛ)

- После подключения кресла к адаптеру питания нажмите кнопку ПИТАНИЕ.
- На пульте загорится светодиодный индикатор ТАЙМЕР 15 минут и кресло перейдет в режим ожидания
- Вы можете изменить время массажа, нажимая кнопку Н. Время изменяется в диапазоне 5-10-15 минут.
- Выберите вид и зону массажа, нажав соответствующие кнопки, чтобы начать сеанс.
- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ еще раз, чтобы выключить массажное кресло.

B) ШИАЦУ (Разминающий массаж)

- Нажмите кнопку ШИАЦУ для активации разминающего массажа.
- Нажмите кнопку ШИАЦУ еще раз, чтобы выключить эту функцию.

C) ПРОКАТ - (Раскатывающий массаж)

- Нажмите кнопку ПРОКАТ для активации раскатывания.
- Нажмите кнопку ПРОКАТ еще раз, чтобы отключить эту функцию.

D) ЗОНА СПИНЫ - (Точечный массаж) (Применяется в режиме ШИАЦУ)

- Нажмите кнопку ЗОНА СПИНЫ в режиме работы массажа Шиаци, чтобы зафиксировать массаж в выбранной зоне.
- Нажмите и удерживайте кнопку стрелки вниз или вверх для перемещения массажных роликов.
- Отпустите кнопку при достижении роликов требуемой зоны массажа.

E) АВТО ПРОГРАММЫ - (Вся Спина; Верх Спины; Низ Спины) (Используются в режиме Шиаци и Раскатывающего массажа)

- Кнопка ВСЯ СПИНА активирует массаж всей спины
- Кнопка ВЕРХ СПИНЫ активирует массаж верхней части спины
- Кнопка НИЗ СПИНЫ активирует массаж в области поясницы

F) ВИБРАЦИЯ - (Вибрационный массаж бедер)

- Нажмите кнопку ВИБРАЦИЯ один раз чтобы активировать непрерывный вибрационный массаж бедер.



ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Нажмите кнопку **ВИБРАЦИЯ** второй раз чтобы активировать ритмичный вибрационный массаж бедер.
- Нажмите кнопку **ВИБРАЦИЯ** третий раз чтобы выключить вибрационный массаж.

G) **ПРОГРЕВ** - (Прогрев массажных роликов)

- Нажмите кнопку **ПРОГРЕВ** для активации функции прогрева. При этом массажные ролики начнут светиться оранжевым светом.
- Нажмите кнопку **ПРОГРЕВ** еще раз для выключения прогрева. При этом массажные ролики начнут светиться зеленым светом.
- При завершении времени массажа функция прогрева выключается автоматически.

H) **ТАЙМЕР** - (Выбор времени сеанса) (по умолчанию 15 мин)

- Последовательно нажимайте кнопку **ТАЙМЕР** для выбора времени массажа в последовательности 5 - 10 - 15 минут.

I) **ШИРИНА** - (Выбор ширины раскатывающего массажа)

- В активном режиме раскатывающего массажа, нажмите кнопку **ШИРИНА** для изменения размещения массажных роликов. Ширина изменяется последовательно и имеет четыре различные позиции.

По окончании сеанса, при необходимости выбора другого вида массажа, нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** и выберите другую функцию массажа. После завершения сеанса отключите вилку питания из розетки и уберите шнур питания и пульт управления в задний карман на спинке массажного кресла.

ВНИМАНИЕ! Роликовый массажный механизм всегда останавливается и фиксируется в нижней части спинки кресла в режиме ожидания. Он автоматически перемещается в это положение после окончания или остановки массажа. Если питание кресла будет прервано во время выполнения массажа, то после возобновления подачи питания, массажные ролики сначала переместятся в крайнее нижнее положение.

Для Вашей безопасности в кресле имеется автоматический таймер, отключающий массаж. При раскачивании кресла следите за тем, чтобы сетевой провод питания не был поврежден или зажат ползьями кресла. Иначе, это может привести к выходу кресла из строя.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Причины	Решения
Массажный механизм кресла не работает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нет электричества 2. Отключен адаптер питания. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включите кресло после подачи питания 2. Проверьте исправность сетевого провода питания и подключение его к розетке.
После нажатия кнопки ПРОГРЕВ функция не включается и не горит индикатор.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кнопка ШИАЦУ не включена. 2. Кнопка ПРОКАТ и одна из кнопок «вся спина», «верх» и «низ» не включена. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включите кнопку ШИАЦУ . 2. Включите кнопку ПРОКАТ и одну из кнопок «вся спина», «верх» и «низ» перед активацией функции прогрева.
Не работает ШИАЦУ или раскатывающий массаж	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кнопка ШИАЦУ не включена. 2. Кнопка ПРОКАТ и одна из кнопок «вся спина», «верх» и «низ» не включена. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включите кнопку ШИАЦУ. 2. Включите кнопку ПРОКАТ и одну из кнопок «вся спина», «верх» и «низ» перед активацией функции прогрева.
Не работает вибрация сиденья	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не включена кнопка Вибрация. 2. Выключатель питания не включен 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включите кнопку Вибрация 2. Включите выключатель питания



ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Для хранения массажного кресла, поместите его в безопасное, сухое и прохладное место. Избегайте контакта с острыми краями или острыми предметами, которые могут порезать или проколоть поверхность кресла. Чтобы избежать поломки, не оборачивайте сетевой шнур вокруг кресла.

ПРАВИЛА ОЧИСТКИ

- Избегайте попадания на кресло любой жидкости во время его чистки.
- Отключите массажное кресло от электросети и дайте ему остыть перед очисткой.
- Очищайте кресло только мягкой, слегка влажной губкой.
- Никогда не допускайте попадания воды или других жидкостей на электрические части массажного кресла.
- Не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, растворитель для очистки поверхности кресла.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать массажное кресло.

ВНИМАНИЕ!

- Не подвергайте массажное кресло и его поверхность любому внешнему воздействию. Берегите его от ударов, растягивания, порезов и чрезмерному давлению.
- Избегайте контакта массажного кресла с твердыми предметами при его переноске и установке.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Характеристика	Описание
Тип	Массажное кресло качалка
Серия	EGO
Модель	WAVE
Артикул	EG 2001
Напряжение питания	АС 100 - 240В
Частота	50 - 60 Гц
Потребляемая мощность	42 Вт
Таймер	5 - 10 - 15 минут
Габариты упаковки (Д x Ш x В)	120 x 81 x 62 см
Габариты без подставки ног (Д x Ш x В)	114 x 68 x 95 см
Габариты с подставкой ног (Д x Ш x В)	135 x 68 x 95 см
Габариты сиденья (Д x Ш)	45 x 58 см
Вес Нетто	33 кг
Вес Брутто	36 кг

ЭГО

www.relaxa.ru