

Инструкция

Массажное кресло Meridien Calabria (White + Green)

Полезные ссылки:

[Массажное кресло Meridien Calabria \(White + Green\) - смотреть на сайте](#)

[Массажное кресло Meridien Calabria \(White + Green\) - читать отзывы](#)



Массажное кресло Calabria Руководство пользователя

(Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед сборкой и использованием кресла)

Введение


Благодарим за покупку нашего кресла. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством, прежде чем использовать массажное кресло, для обеспечения его правильной работы.

Содержание

Подготовка к использованию	02
Строение	04
Инструкция по эксплуатации пульта управления	06
Эксплуатация кресла	07
Технические характеристики	11
Техника безопасности	12
Решение проблем	13
Хранение и обслуживание	14
Название и содержание опасных веществ в данном массажном кресле	15

Подготовка к использованию


(1) Откройте коробку и достаньте компоненты массажного кресла.

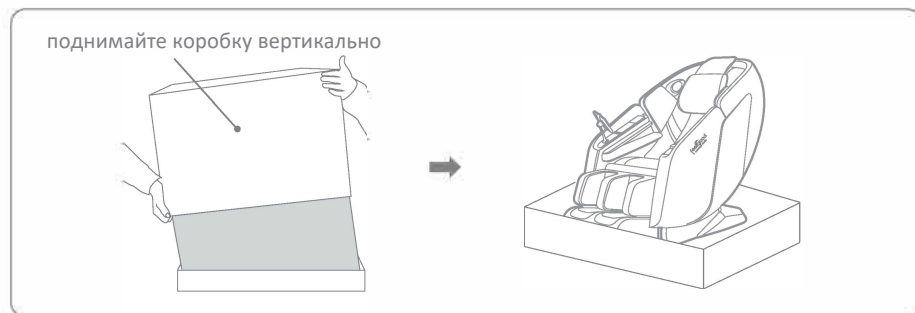

- 1.1 Удалите стяжки и поднимите коробку вертикально.
- 2.2 Достаньте все приспособления из коробок.

(2) Установка массажного кресла

- * Достаньте массажное кресло из коробки и установите в выбранном месте.
- * Не устанавливайте кресло у нагревательных приборов, открытого пламени и под прямыми солнечными лучами.
- * Это может привести к выцветанию или повреждению.
- * Нижняя часть массажного кресла может поцарапать напольное покрытие. Рекомендуется устанавливать кресло на ковер или мягкий мат во избежание повреждения полов.
- * Перед креслом и позади спинки должно быть не менее 25 см свободного пространства.
- * Не устанавливайте массажное кресло в помещениях с высокой влажностью или неровным полом.
- * Устанавливайте кресло в 1 метре от телевизора, радио или других аудио-/видео-устройств, во избежание помех.

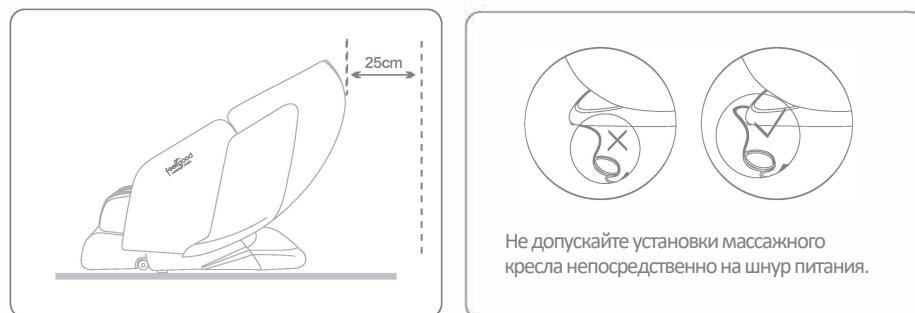


02

Подготовка к использованию


(3) Установка подставки для планшета

Снимите резиновый наконечник, вставьте нижний конец подставки для планшета в гнездо и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его на месте.

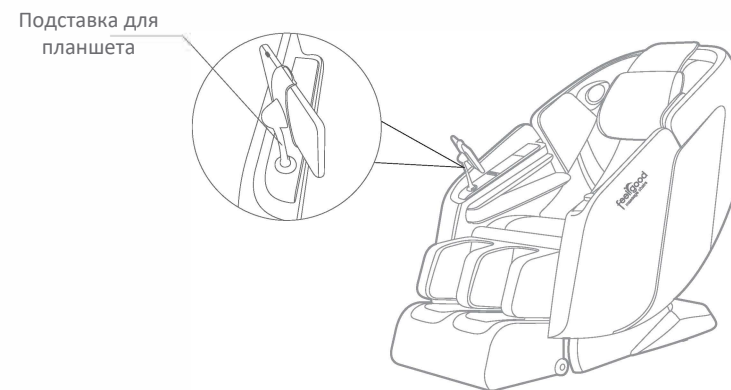


(4) Подключение питания

Подключите шнур питания к выходу в нижней части кресла, а другой конец шнура в розетку. Включите главный переключатель питания. Установка окончена.

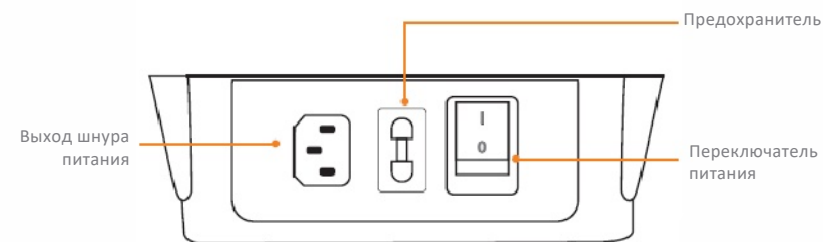


03

Структура

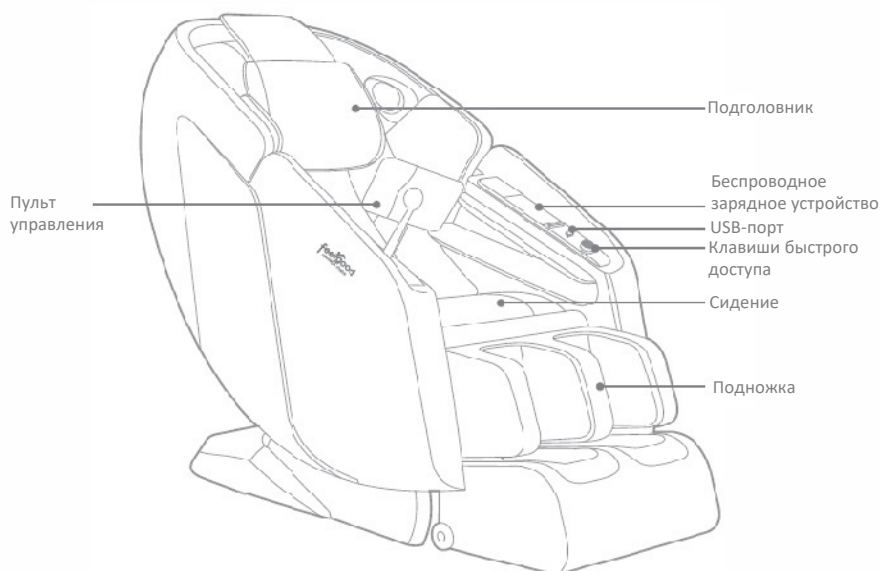

Перемещение массажного кресла

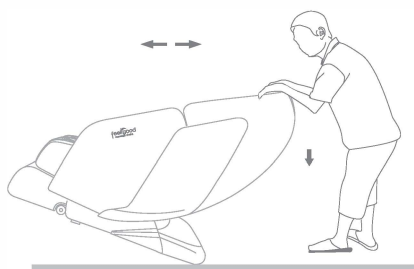

1. Надавите на спинку и наклоните кресло примерно на 30° (см. рисунок слева).
2. Толкайте и катите кресло на колесиках в необходимое место.

*Не перемещайте кресло, если в нем сидит пользователь.

*При перемещении кресла вы можете поцарапать напольное покрытие. Рекомендуется поместить под него ковер или мягкий мат.

*Крепко держите спинку при перемещении, чтобы кресло не упало.

*При перемещении убедитесь, что подножка находится в сложенном положении, чтобы избежать повреждений.




ВНИМАНИЕ

04

Структура

Задняя часть массажного кресла

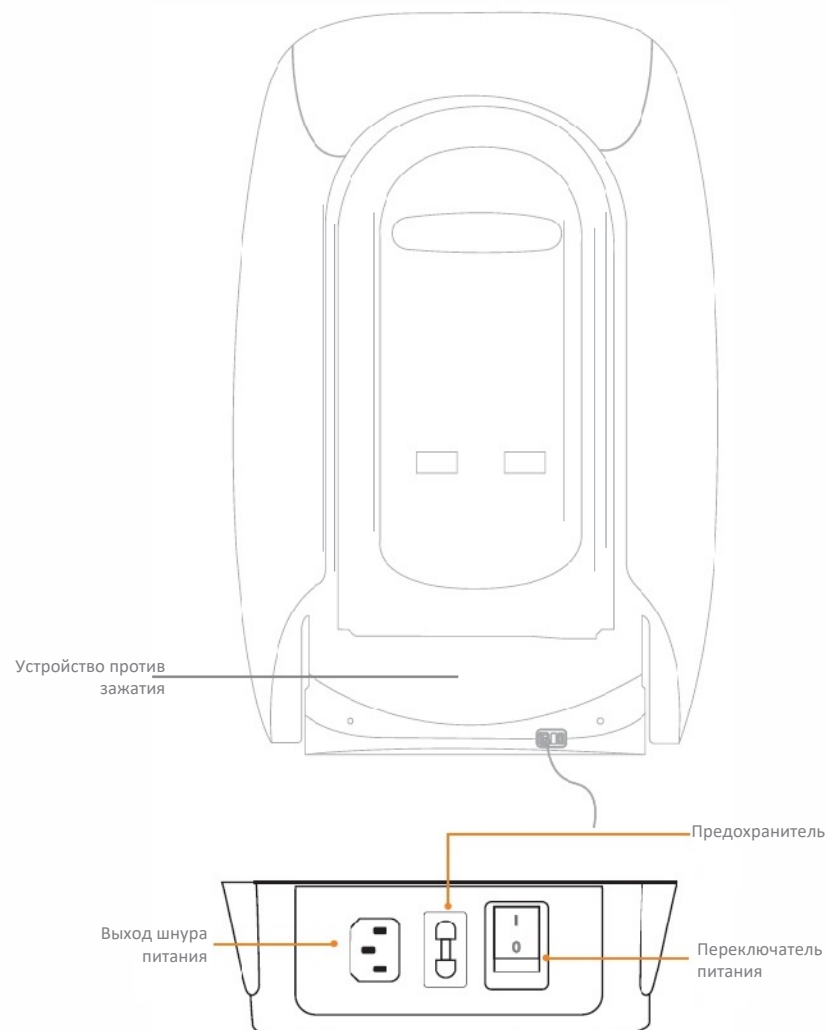


Устройство против зажатия: массажное кресло автоматически прекратит отклонение при определении любого постороннего предмета (например, руки или ребенка). Спинка продолжит отклоняться при удалении постороннего предмета.


05

Инструкция по эксплуатации пульта управления

Клавиши быстрого доступа

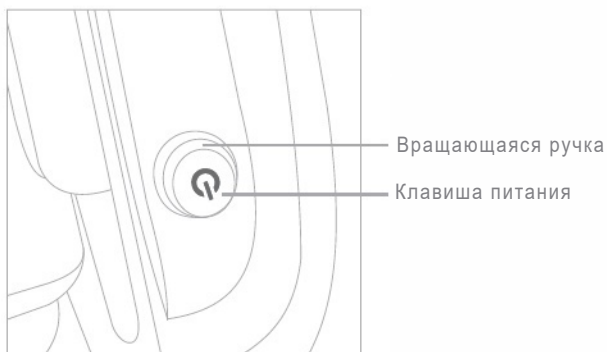

Пульт управления

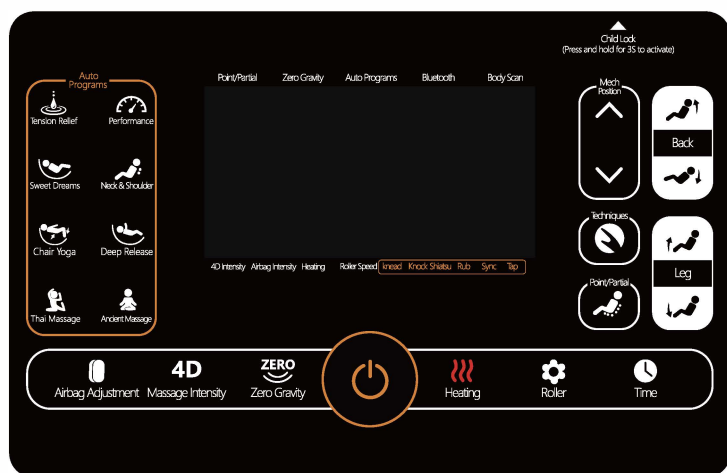

Эксплуатация кресла

Инструкция к клавишам быстрого доступа

- Нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить массажное кресло;
- Нажмите клавишу один раз, чтобы выбрать одну из 8 предварительно установленных автоматических программ: мужской массаж, леди-массаж, приятные сновидения, шея и спина, йога в кресле, глубокое расслабление, тайский массаж и китайский массаж;
- Вращающаяся ручка: вращайте эту ручку для переключения (поднятия/опускания) положения спинки. Вращайте по часовой стрелке, чтобы поднять спинку, вращайте против часовой стрелки, чтобы опустить спинку.



ОСТОРОЖНО

*Не садитесь в массажное кресло, если подножка поднята.

*Резкое сильно нажатие на спинку или подножку может привести к повреждению массажного кресла или травмированию пользователя.


*Перед тем как сесть в кресло убедитесь, что спинка поднята в вертикальное положение. Вы можете опустить спинку до желаемого положения, после того как сядете в него.

*Не кладите ноги, пальцы и любые другие предметы в зазоры в кресле.











*Убедитесь, что рядом с креслом нет детей, домашних животных или других препятствий, прежде чем настраивать угол наклона спинки и подножки.

Эксплуатация кресла


Инструкция к пульту управления

-  **Защита от детей**
При подключении питания нажмите и удерживайте данную клавишу в течение 3 секунд, чтобы заблокировать/разблокировать пульт управления.
-  **Клавиша питания**
Нажмите данную клавишу, чтобы включить массажное кресло, нажмите еще раз, чтобы выключить массажное кресло.
-  Эта программа массажа обеспечит максимальное облегчение мышечного напряжения для пользователей, которые долго работают в сидячем положении с течением дня.
-  Эта программа массажа обеспечивает мягкий расслабляющий массаж для формирования фигуры и ускорения обмена веществ.
-  Мягкий, медленный и аккуратный массаж всего тела с покачиванием, который поможет расслабить тело и быстрее заснуть.
-  В этой программе используются особые техники массажа, облегчающие боль и зажатость в шее и плечах.
-  Эта программа использует техники разминания и растягивания для расслабления натруженных мышц и поддержания их гибкости.
-  Эта программа использует различные техники массажа, включая шиацу и разминание, для снятия усталости тела.
-  Эта программа массажа использует интенсивные техники тайского массажа для расслабления мышц всего тела после интенсивных тренировок.
-  Эта программа использует разминание, растирание, шиацу и постукивание для воздействия на тело с помощью давления.
-  Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы поднять спинку. Отпустите клавишу для остановки.
-  Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы опустить спинку. Отпустите клавишу для остановки.

Эксплуатация кресла

-  Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы поднять подножку. Отпустите клавишу для остановки.
-  Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы опустить подножку. Отпустите клавишу для остановки.
-  Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы поднять массажные ролики вверх. Отпустите клавишу для остановки.
-  Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы опустить массажные ролики вверх. Отпустите клавишу для остановки.
-  Нажмите эту клавишу для переключения на режим ручного массажа. Нажмите еще раз, чтобы выбрать технику ручного массажа.
-  Нажмите эту клавишу в ручном режиме, чтобы переключаться между параметрами Точечного, Частичного и массажа Всего тела. Вы можете нажать и удерживать клавиши Вверх/Вниз для настройки положения роликов.
-  Нажмите эту клавишу в автоматическом режиме, чтобы выбрать один из следующих параметров: уровень интенсивности воздушной подушки 1,2,3,4,5, или ее выключение (деактивация функции воздушной подушки);
Нажмите эту клавишу в ручном режиме, чтобы выбрать один из параметров: воздушные подушки по всему телу, в верхней части или в нижней части тела.
-  **4D** Клавиша настройки интенсивности массажа. Нажмите эту клавишу для настройки интенсивности массажа. Доступно 5 настраиваемых уровней интенсивности.
Нажмите эту клавишу, чтобы установить кресло в положение Нулевой гравитации Zero Gravity. Нажмите клавишу еще раз, чтобы вернуть кресло в положение по умолчанию.
Нажмите и удерживайте эту клавишу в течение 3 секунд, чтобы отключить Bluetooth (настройка по умолчанию: выкл/вкл).
-  Нажмите эту клавишу для выбора уровня нагрева 3,2, 1, или выключения (деактивация функции нагрева).
-  Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать уровень скорости ножных роликов 3,2, 1, или отключить их (деактивация ножных роликов).
Нажмите эту клавишу, чтобы установить время массажа.
Вы можете выбрать одну из настроек: 15-20-25-30-10 минут (15 минут - настройка по умолчанию).
Настройка времени будет сохранена после выключения массажного кресла.

Эксплуатация кресла

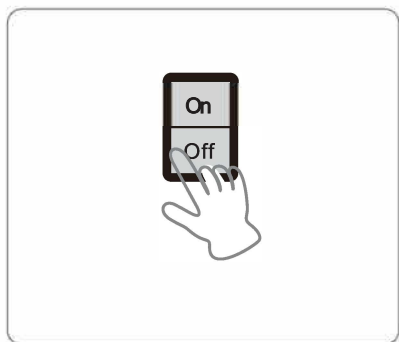

Переклю­ча­тель на­хо­дит­ся в зад­ней ча­сти ко­жуха бло­ка пи­та­ния

*Нажмите на переключатель питания в подлокотнике, для прекращения массажа.

*Если массажное кресло не используется в течение длительного времени, отключите питание.

*Отключите шнур питания из электрической розетки.

*Не тяните за шнур питания, чтобы не повредить его. Это может привести к возгоранию или удару током.

Подключение Bluetooth

*Когда массажное кресло включено, Bluetooth включен по умолчанию.

Вы можете включить Bluetooth на своем мобильном устройстве и выбрать "Feelgood-M810" для синхронизации.

*После подключения Bluetooth вы можете слушать музыку во время массажа.

Технические характеристики

Параметры	Технические характеристики
Модель	Массажное кресло Calabria
Номинальное напряжение	220В~
Номинальная частота	50/60Гц
Номинальная мощность	150Вт
Габариты упаковки	1340мм(Д)×780мм(Ш)×1245мм(В)
Вес	Чистый вес 90кг Общий вес 107кг
Страна-производитель	Китай
Класс безопасности Время работы по умолчанию	Класс I 15минут
Стандарт работы	GB4706.1-2005 GB 4706.10-2008

Данное массажное кресло содержит одобренный беспроводной модуль LAN/Bluetooth с авторизованными CMIIT ID 2021DP9497

Техника безопасности



ВНИМАНИЕ

Прочтите данные инструкции перед использованием. Данное массажное кресло должно использовать розетку, соответствующую вилке. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током. Не модифицируйте вилки и выходы без авторизации производителя и обязательно доверьте их проверку профессиональным техникам. Во избежание риска поражения электрическим током, ожогов, возгорания или травм при использовании электрических изделий необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

- Используйте розетку, соответствующую вилке.
- Убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку, чтобы избежать риск короткого замыкания или возгорания.
- Отключите вилку из розетки после использования или перед очисткой.
- Не используйте данное массажное кресло при высоких температурах.
- Не храните и не используйте массажное кресло на улице или под прямыми солнечными лучами.
- Если во время использования происходит внезапное отключение питания, немедленно переведите переключатель питания в положение "О" и отключите вилку из розетки во избежание повреждения массажного кресла при восстановлении питания.
- Не используйте массажное кресло, если шнур питания влажный или поврежден.
- Не подключайте и не отключайте шнур питания из розетки влажными руками.
- Если массажное кресло использует ребенок или лицо с физическими недостатками, это должно происходить под присмотром.
- Используйте данное массажное кресло только описанным в данном руководстве образом.
- Не используйте приспособления, произведенные компаниями, отличными от Momoda.
- Не стойте, не сидите и не прыгайте на подножке, чтобы избежать повреждений.
- Не пытайтесь садиться на подлокотник или спинку, чтобы не перевернуть массажное кресло и не спровоцировать несчастный случай.
- Не засыпайте во время массажа.
- Сохраняйте массажное кресло в чистоте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия в массажном кресле.
- Не перемещайте массажное кресло, перетягивая его за шнур питания.
- Перед каждым использованием проверяйте кресло на наличие трещин в обивке подлокотников массажного кресла.
- Данное массажное кресло предназначено исключительно для домашнего использования.
- Если вы не уверены, можно ли вам использовать массажное кресло, проконсультируйтесь с врачом.
- Во избежание дискомфорта или травмы, вызванных использованием массажного кресла, следующим категориям людей стоит проконсультироваться с врачом перед использованием массажного кресла: люди, проходящие лечение; люди с заболеваниями спины; люди с искривлением шейного отдела позвоночника.
- Если вы испытываете боль во время использования, немедленно выключите массажное кресло. При получении повреждений во время использования, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Не массируйте покрасневшую, отекающую или воспаленную кожу.
- Данное массажное кресло предназначено для домашнего использования. Это не профессиональное медицинское устройство, поэтому оно не может заменить профессиональное лечение.
- Рекомендуется использовать массажное кресло 30 минут в день, и массировать одну часть тела не более 15 минут, иначе излишнее массирование приведет к обратному эффекту. В долгосрочной перспективе это приведет к перегреву и сокращению срока службы массажного кресла.
- Не используйте данное массажное кресло в помещениях с чрезмерным содержанием газа или кислорода.
- Данное массажное кресло подходит для использования детьми старше 12 лет.



ВНИМАНИЕ


- Категории людей, которым запрещено использовать массажное кресло: физически, эмоционально и ментально неполноценные люди, а также люди, не обладающие необходимым опытом и знаниями. Они могут делать это лишь под наблюдением и после проведения надлежащего инструктажа.
- Детям запрещается играть с массажным креслом.
- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром, приобретенным у производителя или в отделе обслуживания.
- Поверхность массажного кресла нагревается, поэтому людям, не чувствительным к нагреванию, необходимо уделять этому особое внимание.
- Не используйте данное кресло, если напряжение не соответствует его стандартам.
- Данное массажное кресло необходимо подключать в заземленную розетку с надежным заземляющим устройством.
- Необходимо заменять поврежденную кожаную или тканевую обивку. Не используйте массажное кресло до замены во избежание травм.
- Запрещается попадание воды или влаги на пульт управления во избежание поломки.

10 Решение проблем

Возможные проблема	Решение
Странные звуки во время работы	Звук издают компоненты массажного кресла, это не влияет на его работу.
Питание подключено, но массажное кресло не работает	Убедитесь, что вилка подключена в розетку и в выход питания. Убедитесь, что переключатель питания установлен в положение "I". Убедитесь, что шнур питания не поврежден. Убедитесь, что предохранитель не поврежден, замените его при необходимости. Убедитесь, что провод пульта управления подключен и надежно зафиксирован.
Спинка не опускается и не поднимается	Убедитесь, что в зазорах спинки и подножки не застряли посторонние предметы. Убедитесь, что соединительный провод не ослаблен.
Во время эксплуатации пульт управления работает, но массажное кресло не реагирует	Если после длительного периода использования температура кресла слишком высокая, массажное кресло автоматически отключится. Это предусмотрено системой защиты от перегрева. Выключите питание и не используйте кресло в течение 30-50 минут, чтобы оно остыло.
Во время эксплуатации не работает пульт управления и массажное кресло	Это вызвано активацией автоматического таймера. После истечения установленного времени нажмите клавишу еще раз, чтобы включить кресло.

При возникновении аварийной ситуации прекратите эксплуатацию массажного кресла и отключите шнур питания во избежание несчастных случаев. Если приведенные выше варианты решения проблем не помогли, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.

Хранение и обслуживание

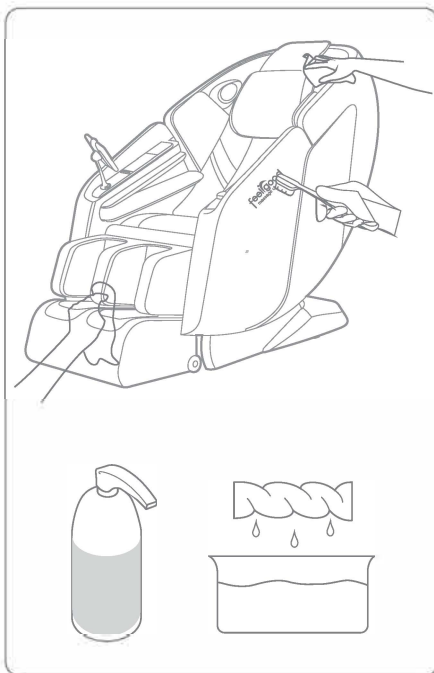

Очистка


Не используйте жесткие губки, абразивные чистящие средства или коррозионные жидкости (бензин или ацетон) для очистки массажного кресла.

1. Отключите массажное кресло из розетки.
2. Очистите массажное кресло, пульт управления и шнур питания сухой тканью.
3. Не используйте влажную ткань или чистящие средства.

Хранение

1. Отключите массажное кресло из розетки.
2. Храните массажное кресло в прохладном сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
3. Не кладите тяжелые предметы на кресло.

Если кожаная обивка повреждена или присутствуют механические повреждения массажного кресла, прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный центр послепродажного обслуживания или службу поддержки в вашей стране (регионе).

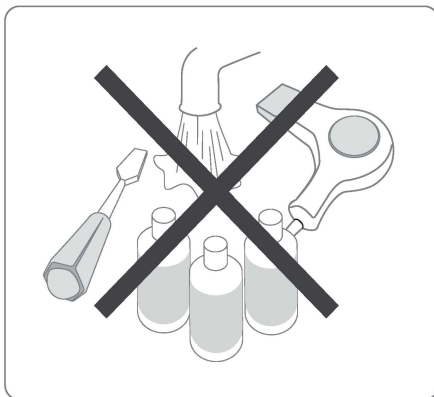

Если вы не используете массажное кресло в течение длительного времени, отключите шнур питания!

Название и содержание опасных веществ в данном массажном кресле

Название	Опасные вещества					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr)	(PBB)	(PBDE)
Корпус	0	0	0	0	0	0
Электроплата*	0	0	0	0	0	0
Металл	0	0	0	0	0	0
Резина	0	0	0	0	0	0
Шнур питания	X	0	0	0	0	0
Линия подкл. внутр. сигнала	0	0	0	0	0	0
Кожа	0	0	0	0	0	0

Данная форма заполнена в соответствии с положениями SJ/T 11364

✗ Компоненты печатной платы включают следующие элементы: резисторы, конденсаторы, интегральные схемы, разъемы и т. д.

○ Указывает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах детали ниже предельного требования, указанного в GB/T26572.

✗ Указывает на то, что содержание опасного вещества хотя бы в одном из однородных материалов детали превышает предельные требования, указанные в GB/T 26572.

Описание периода использования в целях охраны окружающей среды

Данное электрическое устройство используется в условиях, описанных в данном руководстве, и вредные вещества или элементы, содержащиеся в данном устройстве, не будут вытекать и загрязнять окружающую среду или причинять серьезный ущерб людям и имуществу в течение 10 лет.



Наша компания оставляет за собой право улучшать устройство и руководство. Изменения будут вноситься без предварительного уведомления. Внешний вид устройства зависит от фактического устройства; данное руководство было тщательно проверено, однако, это не исключает вероятности опечаток или несоответствий в содержании. Приносим свои извинения.