

Инструкция

Массажное кресло-шезлонг EGO Bounty Plus EG3001 TVF Шоколад (Tony8)

Полезные ссылки:

[Массажное кресло-шезлонг EGO Bounty Plus EG3001 TVF Шоколад \(Tony8\) - смотреть на сайте](#)

[Массажное кресло-шезлонг EGO Bounty Plus EG3001 TVF Шоколад \(Tony8\) - читать ОТЗЫВЫ](#)

ЭГО

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО



Bounty PLUS

Руководство пользователя

модель EG3001 TVF

Версия 2.22

ЭГО

Массажное кресло

Благодарим Вас за покупку массажного кресла серии EGO. Прежде чем использовать кресло, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство по правильному применению и эксплуатации.

Сохраните это руководство для будущего обращения к нему в случае возникновения вопросов.

Bounty PLUS

Руководство пользователя

модель EG3001 TVF

Меры безопасности	1 - 2
Ограничение гарантии	3
Составные части	4
Порядок сборки	5
Порядок эксплуатации	6 - 9
Устранение проблем	10
Хранение и обслуживание	11
Спецификация	12



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании массажного кресла необходимо соблюдать следующие меры безопасности, приведенные ниже:

ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ перед началом использования.

Внимание! Для снижения риска получения ожогов, возгорания, поражения электрическим током или травм:

1. Всегда вставляйте вилку в розетку до упора, чтобы уменьшить риск короткого замыкания.
2. Всегда выключайте кресло и вынимайте вилку из розетки после его использования или перед чисткой.
3. НЕ используйте кресло, если на него попала вода. Сразу отключите его от сети.
4. НЕ используйте кресло после купания или душа.
5. НЕ оставляйте включенное кресло без присмотра. Отключите его от сети, если оно не используется.
6. НЕ оставляйте кресло без присмотра, когда оно используется людьми с ограниченными способностями или детьми.
7. Используйте кресло только по прямому назначению, как описано в руководстве. Не используйте дополнительные опции, не рекомендованные производителем.
8. НЕ используйте булавки или крепежные детали с креслом.
9. НЕ используйте кресло во время сна и не засыпайте в кресле.
10. НЕ роняйте кресло, не помещайте внутрь чужие предметы.
11. НЕ используйте кресло в помещениях с высокой концентрацией аэрозоля или с низким содержанием кислорода.
12. НЕ перемещайте кресло, держась за сетевой шнур.
13. Кресло запрещено использовать детьми без присмотра.
14. НЕ допускайте зажима проводов или попадания их в движущие части, что может привести к поломке.
15. Перед использованием проверьте состояние тканевого покрытия спинки и убедитесь что оно не разорвано. Если Вы обнаружите повреждение, прекратите использование кресла, отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр.
16. Не пользуйтесь креслом, если у него поврежден шнур или вилка питания, если оно неисправно, после падения или попадания на него воды. Срочно обратитесь в сервисный центр.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

17. Массажное кресло не предназначено для коммерческого использования. Это приведет к аннулированию гарантии.

ВНИМАНИЕ!


Внимательно прочитайте все указания по безопасности перед началом эксплуатации кресла:

1. Люди с указанными ниже недугами, должны проконсультироваться с врачом перед использованием кресла:
 - а) при наличии злокачественной опухоли
 - б) при болезнях сердца
 - в) при беременности
 - г) при заболеваниях, требующих покоя
 - д) при болезнях спины или травмах спины в прошлом
2. Люди с кардиостимуляторами и другими медицинскими имплантатами должны проконсультироваться с врачом перед применением кресла.
3. Не используйте массаж более 15 минут одновременно.
4. Непрерывное использование массажа может привести к перегреву и сокращению срока службы кресла. Если это произошло, выключите кресло и дайте ему остыть.
5. Никогда не используйте массаж на опухших или воспаленных местах или при кожных раздражениях.
6. Кресло не является профессиональным оборудованием и обеспечивает только расслабляющий массаж. Не используйте его в качестве замены медицинской помощи.
7. Запрещено использование кресла людьми, имеющими физиологические заболевания, ограничивающие возможности в работе с элементами управления.
8. Запрещено использование кресла людьми, имеющими физиологические заболевания, ограничивающие ощущения массажа в любой части тела.
9. При обнаружении неисправности кресла, немедленно выключите питание и отсоедините шнур из розетки.
11. Не используйте кресло, если шум от его работы превышает обычный звук выполнения массажа.

ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийные обязательства не подлежат передаче.
2. Данная гарантия действует только если массажное кресло приобретено у компании Релакса Стар (Производителя) или ее авторизованного дилера.
3. Доказательством покупки является кассовый чек (квитанция), которые обязательны к предъявлению для гарантийного ремонта.
4. Все подразумеваемые гарантии ограничиваются продолжительностью 1 год с даты покупки массажного кресла.
5. Повреждения и неисправности кресла, вызванные неправильным использованием, обслуживанием и несанкционированным ремонтом не распространяются на данную гарантию.
6. Гарантия не распространяется на аксессуары и приспособления, не относящиеся к массажному креслу.
7. Гарантия не распространяется на кресла, используемые для коммерческих целей, в организациях или в нежилых помещениях. В этом случае срок гарантии устанавливается и согласуется отдельно.
8. Все услуги, охватываемые настоящей гарантией должны быть одобрены Производителем и выполняться только уполномоченным техперсоналом.
9. Если запасные части для ремонтируемых массажных кресел временно недоступны на складе, Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сроки ремонта или замены запасных частей по своему усмотрению.
10. Данное кресло предназначено для использования на территории РФ и адаптировано под технические условия эксплуатации на данной территории. Использование кресла за пределами РФ может привести к потере гарантии.
11. Смягчение и деформация набивки подушек кресла и подголовника не является гарантийным случаем, так как они смягчаются при использовании.
12. Выцветание и износ обивки кресла не является дефектом в соответствии с Гарантией, так как она естественно изнашивается при эксплуатации.
13. Эта гарантия не распространяется на ущерб, причиненный в результате злоупотребления массажем; использование любых аксессуаров; изменение конструкции кресла; неправильной установки; самостоятельного ремонта; неправильного подключения кресла к питанию; неисправности электронной части из-за необеспечения рекомендации производителя по обслуживанию, транспортировке, кражи, пренебрежения рекомендациям, вандализма, или любых других условий, которые находятся вне контроля производителя.
14. Производитель не несет ответственность в любом случае потери, повреждения или неудобства вызванного отказом массажного кресла.
15. Производитель не несет ответственность за любой случайный, косвенный или специальный ущерб.
16. Исключительная ответственность Производителя заключается в предоставлении бесплатного гарантийного ремонта и замены дефектной детали.

Составные части массажного кресла

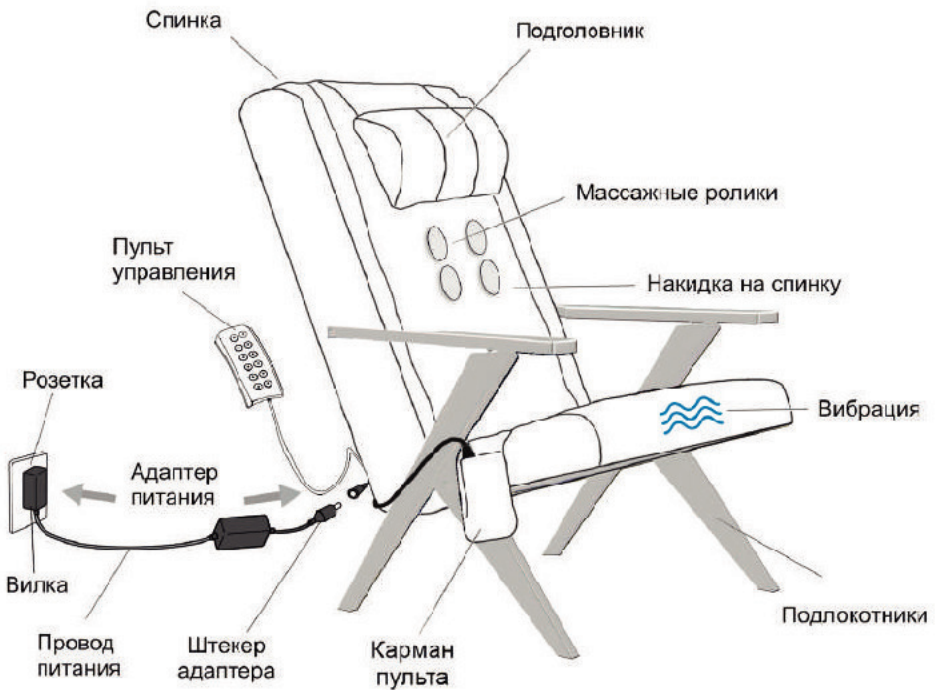

ПОРЯДОК СБОРКИ

СХЕМА СБОРКИ

A

Установите деревянные шканты в крайние отверстия поперечных планок, как это показано на рисунке

B




С помощью S-образного шестигранного ключа и крепежных элементов №1 прикрепите ножку каркаса к поперечным планкам каркаса поперечных планках используйте гайки-бочонки С помощью S-образного ключа и крепежных элементов №1 прикрепите ножку каркаса к основанию кресла

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для полноценного массажа откиньте переднюю накидку кресла назад. Это позволит получить полноценный контакт с массажными роликами. Управление режимами массажа осуществляется с помощью кнопок пульта, расположенного в правом боковом кармане.

Назначение кнопок управления

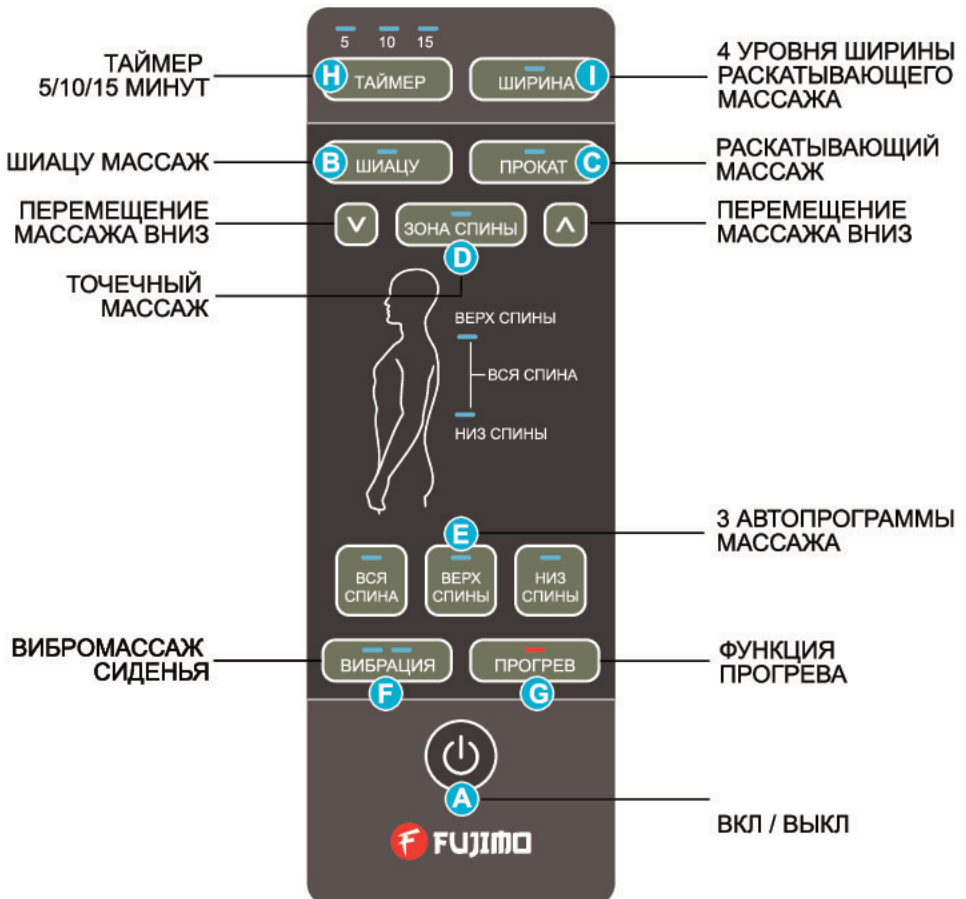

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

А) ПИТАНИЕ (ВКЛ / ВЫКЛ)

- После подключения кресла к адаптеру питания нажмите кнопку ПИТАНИЕ.
- На пульте загорится светодиодный индикатор ТАЙМЕР 15 минут и кресло перейдет в режим ожидания
- Вы можете изменить время массажа, нажимая кнопку Н. Время изменяется в диапазоне 5-10-15 минут.
- Выберите вид и зону массажа, нажав соответствующие кнопки, чтобы начать сеанс.
- Нажмите ВКЛ/ВЫКЛ еще раз, чтобы выключить кресло.

В) ШИАЦУ (Разминающий массаж)

- Нажмите кнопку ШИАЦУ для активации разминающего массажа.
- Нажмите ШИАЦУ еще раз, чтобы выключить эту функцию.

С) ПРОКАТ - (Раскатывающий массаж)

- Нажмите кнопку ПРОКАТ для активации раскатывания.
- Нажмите ПРОКАТ еще раз, чтобы отключить эту функцию.

Д) ЗОНА СПИНЫ - (Точечный массаж) (Применяется в режиме ШИАЦУ)

- Нажмите кнопку ЗОНА СПИНЫ в режиме работы массажа Шиацу, чтобы зафиксировать массаж в выбранной зоне.
- Нажмите и удерживайте кнопку стрелки вниз или вверх для перемещения массажных роликов.
- Отпустите кнопку при достижении роликов требуемой зоны массажа.

Е) АВТО ПРОГРАММЫ - (Вся Спина; Верх Спины; Низ Спины)

(Используются в режиме Шиацу и Раскатывающего массажа)

- Кнопка ВСЯ СПИНА активирует массаж всей спины
- Кнопка ВЕРХ СПИНЫ активирует массаж верхней части спины
- Кнопка НИЗ СПИНЫ активирует массаж в области поясницы

Ф) ВИБРАЦИЯ - (Вибрационный массаж бедер)

- Нажмите кнопку ВИБРАЦИЯ один раз чтобы активировать непрерывный вибрационный массаж бедер.
- Нажмите кнопку ВИБРАЦИЯ второй раз чтобы активировать ритмичный вибрационный массаж бедер.
- Нажмите кнопку ВИБРАЦИЯ третий раз чтобы выключить вибрационный массаж.

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Г) ПРОГРЕВ - (Прогрев массажных роликов)

- Нажмите кнопку ПРОГРЕВ для активации функции прогрева. При этом массажные ролики начнут светиться оранжевым светом.
- Нажмите кнопку ПРОГРЕВ еще раз для выключения прогрева. При этом массажные ролики начнут светиться зеленым светом.
- При завершении времени массажа функция прогрева выключается автоматически.

Н) ТАЙМЕР - (Выбор времени сеанса) (по умолчанию 15 мин)

- Последовательно нажимайте кнопку ТАЙМЕР для выбора времени массажа в последовательности 5 - 10 - 15 минут.

И) ШИРИНА - (Выбор ширины раскатывающего массажа)

- В активном режиме раскатывающего массажа, нажмите кнопку ШИРИНА для изменения размещения массажных роликов. Ширина изменяется последовательно и имеет четыре различные позиции.

По окончании сеанса, при необходимости выбора другого вида массажа, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и выберите другую функцию массажа. После завершения сеанса отключите вилку питания из розетки и уберите шнур питания и пульт управления в задний карман на спинке массажного кресла.


ВНИМАНИЕ! Роликовый массажный механизм всегда останавливается и фиксируется в нижней части спинки кресла в режиме ожидания. Он автоматически перемещается в это положение после окончания или остановки массажа. Если питание кресла будет прервано во время выполнения массажа, то после возобновления подачи питания, массажные ролики сначала переместятся в крайнее нижнее положение.

Для Вашей безопасности в кресле имеется автоматический таймер, отключающий массаж. При эксплуатации кресла следите за тем, чтобы сетевой провод питания не был поврежден или зажат ножками кресла. Иначе, это может привести к выходу кресла из строя.

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Порядок наклона спинки кресла

Для удобства использования, спинка кресла имеет 3 положения наклона.

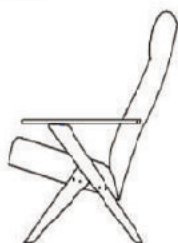

Положение №1




Положение №2



Положение №3

Для перевода кресла из "Положения №1" в "Положение №2" или "Положение №3" нужно следующее:

- Не вставая с кресла, взяться руками за подлокотники и сместить их внутрь кресла. При этом "Винт-стопор" выйдет (со щелчком) из "Гнезда №1";
- Не снимая рук с подлокотников, подать подлокотники немного назад (≈ 5 см) и наружу ($\approx 1,5$ см). "Винт-стопор" при этом войдет до упора в боковое ответвление "Гнезда №2", а спинка кресла окажется в "Положении №2";
- Аналогичным образом спинка переводится из "Положения №2" в "Положение №3".

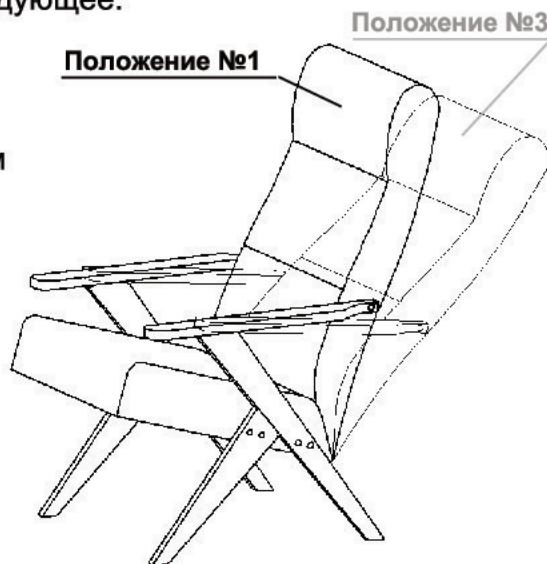

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Причины	Решения
Кресло не работает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нет питания в сети 2. Отключен адаптер питания 3. Кнопка питания ВКЛ/ВЫКЛ не нажата 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включите кресло после подачи питания 2. Подключите адаптер питания к креслу 3. Нажмите кнопку питания ВКЛ/ВЫКЛ
После нажатия кнопки ПРОГРЕВ функция не включается	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кнопка АВТО не нажата 2. Кнопка ВЕРХ СПИНЫ не нажата 3. Кнопка НИЗ СПИНЫ не нажата 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включите кнопку АВТО перед активацией функции прогрева 2. Включите кнопку ВЕРХ СПИНЫ перед активацией прогрева 3. Включите кнопку НИЗ СПИНЫ перед активацией прогрева
Не работает вибрация сиденья	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не включена кнопка Вибрация. 2. Выключатель питания не включен 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включите кнопку Вибрация 2. Включите выключатель питания



ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Для хранения массажного кресла, поместите его в коробку и в безопасное, сухое и прохладное место. Избегайте контакта с острыми краями или острыми предметами, которые могут порезать или проколоть поверхность кресла. Чтобы избежать поломок, не оборачивайте сетевой шнур вокруг кресла.

ПРАВИЛА ОЧИСТКИ

- Избегайте попадания на кресло любой жидкости во время его очистки.
- Отключите массажное кресло от электросети и дайте ему остыть перед очисткой.
- Очищайте кресло только мягкой, слегка влажной губкой.
- Никогда не допускайте попадания воды или других жидкостей на электрические части массажного кресла.
- Не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, растворитель для очистки поверхности кресла.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать массажное кресло.

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание поломок кресла, выполняйте наклон спинки строго следуя инструкции.
- Во избежание травм спины, не опирайтесь с усилием на роликовый массажный механизм при изменении положения тела сидя в кресле.
- Не допускайте чрезмерного давления или усилия любой части тела на движущийся роликовый механизм.
- Во избежание получения травм и поломок, прилагайте к креслу только легкое усилие.

Характеристика	Описание
Тип	Массажное кресло
Серия	ЭГО
Модель	EG3001 TVF
Напряжение питания	АС 100 - 240 В
Частота	50 - 60 Гц
Мощность	42 Вт
Таймер	5 / 10 / 15 минут
Размеры (Д x Ш x В)	109 x 65 x 92 см
Вес	Нетто: 15,6 кг
	Брутто: 17,6 кг

ЭГО

www.relaxa.ru